



**TECHNIMOUNT**  
EMS®

## SAFETY MD-TRANSPORTER®

GUIDE DE L'UTILISATEUR



SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ  
LÀ OÙ C'EST IMPORTANT

## Droits d'auteur

Droits d'auteur 2026 Gestion Technimount S.A.M.U. Inc. est une société affiliée de Technologies CGC Inc. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération, traduite dans une langue quelconque, modifiée sous quelque forme ou par quelque moyen, sans l'autorisation écrite de Technimount ou de ses sociétés affiliées.

## Marques de commerce

Les noms des fabricants de produits et d'appareils médicaux sont des marques de commerce<sup>MC</sup> ou des marques déposées<sup>MD</sup> de leurs détenteurs respectifs.

- Technimount EMS®, Bracket Pro Serie® et Safety MD-Transporter® sont des marques déposées de Technologies CGC Inc.
- Stryker® Power-Pro® sont des marques déposées de Stryker Corporation.
- Oxivir® est une marque déposée de Diversy.
- Lavo® est une marque déposée de KIK Holdco Company, Inc.

Pour tout problème avec votre produit Technimount, ses composants ou pour toute question technique lors de l'installation, l'utilisation ou la maintenance, communiquer avec le support technique à l'adresse [techsupport@technimount.com](mailto:techsupport@technimount.com).

## Coordonnées

### Gestion Technimount S.A.M.U. Inc.

Aux soins des affaires réglementaires

3770 rue Jean Marchand, 100-C

Québec (Québec) G2C 1Y6

Canada

[customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com)

[techsupport@technimount.com](mailto:techsupport@technimount.com)

[legal@technimount.com](mailto:legal@technimount.com)

[www.technimount.com](http://www.technimount.com)

T + 1 581 700-6613

SF + 1 888 639-2758 (Amérique du nord)

## Table des matières

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Droits d'auteur .....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>Marques de commerce.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>Coordonnées .....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>1. Mentions et considérations générales .....</b>                          | <b>5</b>  |
| ..... 1.1. Utilisation prévue .....   | 5         |
| ..... 1.2. Compétence de l'utilisateur .....                                  | 5         |
| ..... 1.3. Garanties.....   | 6         |
| ..... 1.3.1. Politique de garantie.....                                       | 6         |
| ..... 1.3.2. Garantie limitée .....   | 6         |
| ..... 1.3.3. Clause de garantie internationale .....                          | 7         |
| ..... 1.3.4. Responsabilité de l'utilisateur.....                             | 7         |
| ..... 1.4. Réclamations.....  | 7         |
| ..... 1.4.1. Marchandise endommagée ou défectueuse .....                      | 7         |
| ..... 1.4.2. Politique de retour.....   | 7         |
| ..... 1.4.3. Autorisation de retour de matériel (ARM) .....                   | 8         |
| ..... 1.4.4. Processus de réclamation .....                                   | 8         |
| <b>2. Directives générales de sécurité .....</b>                              | <b>9</b>  |
| ..... 2.1. Symboles et définitions .....                                      | 9         |
| ..... 2.2. Étiquettes.....  | 10        |
| ..... 2.3. Mesures de sécurité.....   | 11        |
| <b>3. Spécifications techniques .....</b>                                     | <b>13</b> |
| <b>4. Illustrations d'orientation.....</b>                                    | <b>15</b> |
| <b>5. Pièces illustrées .....</b>   | <b>16</b> |
| <b>6. Spécifications illustrées .....</b>                                     | <b>17</b> |
| <b>7. Mécanisme de sécurité .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>8. Utiliser le Safety MD-Transporter .....</b>                             | <b>21</b> |
| ..... 8.1. Installer le Safety MD-Transporter dans la Micro Base.....         | 21        |
| ..... 8.2. Retirer le Safety MD-Transporter de la Micro Base.....             | 22        |
| ..... 8.3. Installer l'appareil médical dans le Safety MD-Transporter.....    | 23        |
| ..... 8.4. Retirer l'appareil médical du Safety MD-Transporter.....           | 25        |
| <b>Annexe I Évaluation des compétences du personnel SMU et clinique .....</b> | <b>26</b> |
| <b>Annexe II Déballer le Safety MD-Transporter .....</b>                      | <b>28</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Annexe III Maintenance</b> .....                     | <b>29</b> |
| ..... Fréquence de maintenance .....                    | 31        |
| ..... Outils fournis par le client .....                | 31        |
| ..... Solutions de nettoyage testées et approuvées..... | 31        |
| ..... Plan de maintenance .....                         | 32        |
| ..... Vérifications de sécurité.....                    | 32        |
| ..... Maintenance basée sur l'état .....                | 33        |
| ..... Journal de maintenance.....                       | 34        |
| ..... Points d'inspection illustrés.....                | 35        |
| <b>Annexe IV Pièces/ensemble de remplacement</b> .....  | <b>36</b> |

## 1. Mentions et considérations générales

Ce guide de l'utilisateur contient des renseignements détaillés sur le produit, les standards et les directives afin d'assister l'administrateur/gestionnaire/superviseur et le technicien biomédical (ou équivalent) avec le déballage, l'assemblage (lorsque indiqué), la maintenance, l'évaluation des compétences et la formation du personnel SMU et clinique, ainsi que des renseignements spécifiques afin d'opérer de façon sécuritaire et efficace le Safety MD-Transporter.

Veillez lire attentivement le guide de l'utilisateur afin d'évaluer, de comprendre et de transmettre son contenu au personnel SMU et clinique lors de la formation, afin de les prévenir de tout danger potentiel lié à son utilisation abusive, comment utiliser le produit de façon sécuritaire et fournir un lieu sécuritaire pour les patients ainsi que pour eux-mêmes. Vos protocoles internes établis doivent être mis à jour pour inclure les normes, les directives, les exigences et les recommandations de sécurité relatives au(x) produit(s) Technimount figurant dans cette documentation. Le guide de l'utilisateur doit rester à la disposition des utilisateurs en cas de besoin et être transmis en cas de vente ultérieure du produit.

**REMARQUE :** Technimount cherche continuellement à améliorer la conception et la qualité des produits. Bien que ce guide de l'utilisateur contienne les renseignements les plus récents sur le produit au moment de l'impression, il peut contenir des différences mineures avec la version actuelle, incluant les références illustrées. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le support technique à l'adresse [techsupport@technimount.com](mailto:techsupport@technimount.com).

**REMARQUE :** Technimount se réserve le droit de modifier les numéros de pièces et les produits sans préavis. Communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse [customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com) afin de s'assurer des options et de la disponibilité du produit.

### 1.1. Utilisation prévue

Le Safety MD-Transporter est un système de fixation conçu afin de permettre au personnel SMU et clinique formé de sécuriser et de transporter des appareils médicaux et accessoires sur des civières lors du transport aérien ou terrestre des services médicaux d'urgence et des soins critiques.

### 1.2. Compétence de l'utilisateur

Afin d'utiliser le Safety MD-Transporter de façon sécuritaire, le personnel doit avoir le niveau de compétence requis en prenant en compte leur fonction et leur niveau d'interaction avec le système de fixation. Une formation doit être offerte au personnel SMU et clinique avant qu'ils utilisent le Safety MD-Transporter. Consulter la section « Évaluation des compétences du personnel SMU et clinique » à la page 26 pour évaluer leurs compétences.



Indique à qui s'adresse le contenu de la section et le niveau de connaissance requis. Les définitions des trois (3) niveaux de compétence sont précisées ci-dessous.

- **Compétent (personnel SMU et clinique) :** A reçu la formation requise, possède les connaissances suffisantes pour utiliser le produit de façon sécuritaire et a réussi l'évaluation des compétences (consulter la section « Évaluation des compétences du personnel SMU et clinique » à la page 26).

**REMARQUE :** Tout membre du personnel SMU et clinique n'ayant pas reçu la formation requise, ni les connaissances nécessaires pour opérer le système de fixation de façon sécuritaire ne doit pas utiliser le produit.

- **Chevronné (administrateur/gestionnaire/superviseur) :** Possède des connaissances et une compréhension approfondies du produit et est familier des standards et des directives. Qualifié pour former le personnel SMU et clinique à l'utilisation sécuritaire du produit.
- **Avancé (technicien biomédical ou équivalent) :** Possède une vaste expérience mécanique. Qualifié pour effectuer le déballage, l'assemblage, les vérifications de sécurité, la maintenance basée sur l'état telle que détaillée dans ce document, ou le dépannage de base, les procédures de mise à niveau et les procédures de remplacement lorsqu'applicables.

### 1.3. Garanties

#### 1.3.1. Politique de garantie

Cette déclaration constitue l'intégralité de la politique de garantie de Technimount en ce qui concerne les produits Technimount. Technimount ne formule aucune autre garantie ou déclaration, exprimée ou implicite, sauf dans la mesure prévue aux présentes. Il n'y a aucune garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. En aucun cas Technimount ne pourra être tenue responsable, en vertu des présentes, des dommages accessoires ou indirects, découlant de la vente ou de l'utilisation d'un tel produit ou de quelque manière que ce soit.

Gestion Technimount S.A.M.U. Inc. garantit à l'« acheteur » d'origine du « produit » avec lequel la « garantie limitée » est incluse, que le produit sera exempt de « défauts » de fabrication et de matériaux dans des conditions d'utilisation normale pour une « période de garantie » d'un (1) an à compter de la date d'achat du produit par l'acheteur. Lors de la période de garantie, le produit sera réparé ou remplacé conformément à la « garantie limitée » sans frais pour l'acheteur pour les pièces ou la main-d'œuvre. Les pièces et le produit peuvent être réparés ou remplacés par des pièces ou des produits neufs ou remis à neuf. En vertu de la présente garantie limitée, « remis à neuf » désigne les pièces et les produits qui sont remis à l'état d'origine quant aux spécifications d'usine, plus précisément. Si le produit est réparé ou remplacé lors de la période de garantie, le plus long entre la période de garantie restante ou trois (3) mois à compter de la date de réparation ou de remplacement s'appliquera. Si le produit est réparé ou remplacé après la fin de la période de garantie, la période de garantie pour la réparation ou le remplacement expirera trois (3) mois après la date de réparation ou de remplacement.

#### 1.3.2. Garantie limitée

Les produits Technimount sont destinés à sécuriser les appareils médicaux en place en cas d'un impact à collision unique ou d'un atterrissage d'urgence unique, et doivent être immédiatement remplacés par la suite. Si l'utilisateur final utilise un produit Technimount à la suite d'un impact à collision unique ou d'un atterrissage d'urgence unique, il le fait à ses propres risques et Technimount ne sera pas tenu responsable.

La garantie limitée ne s'applique pas à l'usure normale qui pourrait résulter d'une utilisation normale. Elle ne s'applique pas lorsque le produit ou l'un de ses composants a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Technimount. Elle ne couvre pas la réparation ou le remplacement d'un produit ou d'une partie de celui-ci endommagés par négligence, mauvaise utilisation, humidité, liquides, exposition à la chaleur, accidents, abus et non-respect des instructions d'installation et d'utilisation fournies avec le produit. La garantie limitée ne couvre pas les dommages physiques à la surface du produit. La décision de réparer, remplacer ou refuser

la couverture est définitive et à la seule discrétion de Technimount, sans compensation ni obligation de la part de Technimount. Le produit, défini comme « système de fixation », est spécifiquement conçu pour sécuriser et transporter des appareils médicaux et accessoires sur des civières lors du transport aérien ou terrestre des services médicaux d'urgence et des soins critiques, et doit être utilisé que pour répondre à cette exigence. Toute autre utilisation annulera la garantie et Technimount ne sera pas tenue responsable de toute réclamation si le produit a été modifié ou adapté pour une autre utilisation.

### 1.3.3. Clause de garantie internationale

Cette garantie est conforme à la politique nationale canadienne. La garantie à l'extérieur du Canada peut varier d'un pays à l'autre. Communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse [customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com) pour obtenir de plus amples renseignements.

### 1.3.4. Responsabilité de l'utilisateur

L'acheteur et l'administrateur sont responsables de valider les règlements et les normes de sécurité dans leur région afin de se conformer aux réglementations de sécurité applicables. Technimount n'est pas responsable d'informer l'acheteur ou l'administrateur de toute réglementation applicable en matière de sécurité dans sa région.

L'administrateur est responsable de fournir une formation adéquate à tout le personnel qui installera, utilisera et effectuera la maintenance des produits Technimount.

## 1.4. Réclamations

### 1.4.1. Marchandise endommagée ou défectueuse

La réglementation ICC exige que les réclamations pour marchandise endommagée soient faites auprès du transporteur dans les quinze (15) jours suivant la date de réception. **Ne pas accepter** les marchandises endommagées à moins que de tels dommages ne soient indiqués sur le reçu de livraison au moment de la réception. Après une notification rapide, Technimount présentera une réclamation de transport au transporteur approprié pour les dommages subis. Le montant des réclamations est limité au coût de remplacement réel. Si la réclamation n'a pas été reçue par Technimount dans les quinze (15) jours suivant la date de livraison, ou si les dommages n'ont pas été notés sur le reçu de livraison au moment de la réception, le client sera responsable du paiement complet de la facture originale.

Les réclamations pour des articles manquants ou brisés doivent être faites dans les trente (30) jours suivant la facturation. Pour plus de détails, reportez-vous au « Processus de réclamation » à la page 8 ou communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse [customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com).

### 1.4.2. Politique de retour

Les produits Technimount peuvent être retournés jusqu'à soixante (60) jours à compter de la date de réception, si :

- Le produit reçu ne correspond pas à ce qui a été commandé à l'origine.
- Le produit ne répond pas aux spécifications techniques de la fiche technique de Technimount.
- Le produit n'est pas compatible avec l'appareil sur lequel il a été conçu pour être installé.

Pour retourner un produit Technimount,

- Une autorisation de retour de matériel (ARM) doit être demandée et approuvée par Technimount avant de retourner le produit.
- Les produits doivent être retournés non endommagés et dans leur emballage d'origine, identifiés de manière appropriée avec le numéro d'ARM approuvée. Les retours ne seront pas approuvés pour un article modifié ou endommagé.
- Des frais peuvent s'appliquer si le colis reçu est endommagé ou s'il manque des articles.
- L'acheteur est responsable des frais de remise en stock (voir le « Tableau 1: Frais de remise en stock »).

**Tableau 1:** Frais de remise en stock

| FRAIS DE REMISE EN STOCK       |     |
|--------------------------------|-----|
| Avant trente (30) jours        | 10% |
| Avant quarante-cinq (45) jours | 25% |
| Avant soixante (60) jours      | 30% |

Pour tout défaut de fabrication, consulter les conditions de la politique de garantie ou communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse [customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com) pour obtenir de plus amples renseignements.

#### 1.4.3. Autorisation de retour de matériel (ARM)

Le service à la clientèle de Technimount est responsable de tous les retours de marchandises et fournira un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM), après approbation. L'ARM doit être imprimée et placée sur la marchandise retournée. Technimount se réserve le droit de facturer des frais d'expédition et de remise en stock (voir le « Tableau 1: Frais de remise en stock ») pour les articles retournés. Les articles spéciaux, modifiés ou discontinués, ne sont pas sujets à des retours.

#### 1.4.4. Processus de réclamation

À la réception de la marchandise retournée, une inspection approfondie sera effectuée. Si la marchandise est conforme à la politique de retour ou si elle est jugée défectueuse, Technimount prendra des mesures correctives et fermera la réclamation. Toutefois, si l'article n'est pas défectueux, mais qu'il a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, il ne sera pas couvert par la garantie. Les détails des constatations et conclusions vous seront communiqués peu de temps après. Pour soumettre une réclamation, communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse [customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com) pour obtenir un formulaire d'autorisation de retour de matériel (ARM) et des instructions de retour.

## 2. Directives générales de sécurité



Le contenu de cette section est destiné au personnel ayant un niveau de connaissance compétent, chevronné ou avancé. Consulter la section « Compétence de l'utilisateur » à la page 5 au besoin.

Les pictogrammes, les symboles de sécurité et les étiquettes sont utilisés pour alerter l'utilisateur d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut mettre en danger les patients ou le personnel SMU et clinique, et/ou endommager le produit. Cela comprend les précautions spéciales nécessaires à l'utilisation sécuritaire et efficace du produit Technimount afin d'éviter les dommages pouvant résulter de l'utilisation ou d'une mauvaise utilisation.

Les termes « Avertissement » et « Attention » dans les présentes ont une signification particulière et doivent être passés en revue attentivement avant de lire les « Mesures de sécurité » à la page 11.

**AVERTISSEMENT** – Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves, et/ou endommager le produit.

**ATTENTION** – Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées, et/ou endommager le produit.

### 2.1. Symboles et définitions



**AVERTISSEMENT – Risque de blessure**

Indique lorsqu'une mauvaise utilisation du produit Technimount pourrait causer des blessures aux patients, au personnel SMU et clinique, ou endommager le produit.



**ATTENTION – Pratique sécuritaire**

Avertit le lecteur de porter une attention particulière aux recommandations et aux méthodes décrivant l'utilisation sécuritaire du produit afin de minimiser les risques pour les patients, le personnel SMU et clinique et le produit.



**ATTENTION – Manipulation et utilisation sécuritaires**

Avertit le lecteur de porter une attention particulière aux recommandations pour l'utilisation sécuritaire du produit et des situations potentiellement dangereuses qui peuvent entraîner des blessures mineures pour les patients ou le personnel SMU et clinique. Cela comprend les précautions spéciales nécessaires à l'utilisation sécuritaire et efficace du produit afin d'éviter les dommages pouvant résulter de l'utilisation ou d'une mauvaise utilisation.



**ATTENTION – Charge Maximale d'Utilisation (CMU)/équilibre de la charge**

Indique la charge maximale pour une utilisation sécuritaire du produit.




**ATTENTION – Suivre les instructions d'utilisation**

Appel à l'action. Rappelle au lecteur de consulter le guide de l'utilisateur pour obtenir des renseignements.

## 2.2. Étiquettes

L'étiquetage sur la surface du produit Technimount permet d'identifier rapidement les risques potentiels et fournit des renseignements à l'utilisateur. Une étiquette manufacturière, y compris le numéro de série et les spécifications de la charge maximale d'utilisation (Figure 1), est visible sur le produit Technimount.

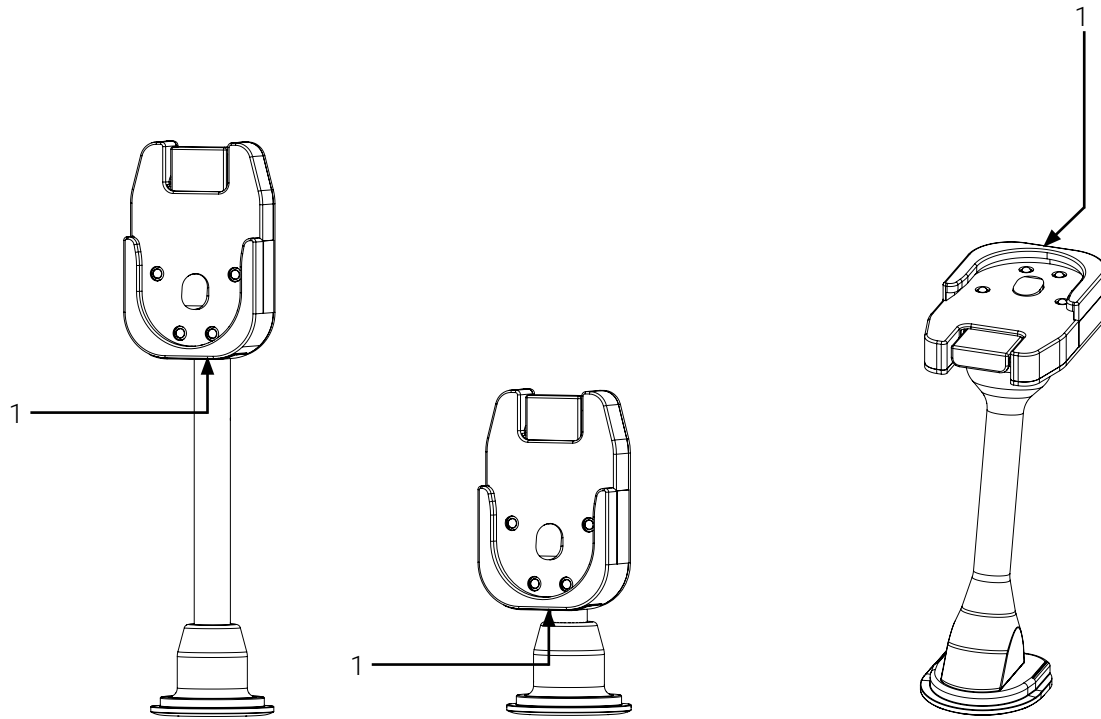

1. Étiquette manufacturière

**Figure 1:** Emplacement de l'étiquette manufacturière

### 2.3. Mesures de sécurité

Lire attentivement toutes les mesures de sécurité décrites, et toujours respecter toutes les directives de sécurité énoncées dans le présent document avant d'utiliser le produit Technimount.

Des mesures de sécurité plus spécifiques concernant les vérifications de sécurité et la maintenance basées sur l'état, destinées au personnel ayant un niveau de connaissance avancé, se trouvent dans la section « Maintenance » à la page 29.



#### **AVERTISSEMENT – Systèmes non autorisés**

- **En aucun cas**, le Safety MD-Transporter ne doit être installé sur, connecté à ou utilisé en combinaison avec un système de fixation, une base, ou un équipement similaire d'un tiers/concurrent, sauf si Technimount a fourni une confirmation écrite formelle de compatibilité pour la configuration spécifique.
- Le Safety MD-Transporter a été conçu et testé exclusivement pour être utilisé avec des composants et des systèmes Technimount approuvés et compatibles. L'utilisation de systèmes non autorisés et/ou incompatibles peut entraîner la chute de l'équipement, un fonctionnement imprévisible ou une défaillance, pouvant causer des blessures graves aux patients, au personnel SMU et clinique.
- Technimount n'assume aucune responsabilité pour tout dommage, dysfonctionnement ou blessure résultant de l'utilisation de systèmes non autorisés ou incompatibles. L'utilisation de systèmes non autorisés et/ou incompatible peut entraîner une non-conformité aux normes de sécurité applicables et annulera immédiatement toutes les garanties et couvertures de responsabilité.
- Les produits Technimount sont destinés à être utilisés uniquement dans le cadre de leurs applications définies, y compris, mais sans s'y limiter, les services médicaux d'urgence, le transport des soins critiques et les environnements de soins de santé approuvés. Consulter les « Spécifications techniques » à la page 13.
- Les règlements et les normes de sécurité sont la responsabilité exclusive de l'utilisateur final. S'assurer que vos protocoles internes établies sont à jour et répondent aux spécifications techniques aux présentes (consulter les « Spécifications techniques » à la page 13), ainsi qu'aux exigences de conformité locales et régionales avant l'utilisation.



#### **AVERTISSEMENT – Risque de blessure**

- **Ne pas utiliser** le Safety MD-Transporter si les vis sont desserrées ou manquantes afin d'éviter tout risque de bris, la chute de l'équipement ou un fonctionnement imprévisible, pouvant causer des blessures graves aux patients, au personnel SMU et clinique.
- Cesser immédiatement d'utiliser le Safety MD-Transporter si un incident grave survient et informer le personnel autorisé, afin de contacter le support technique à [technicalsupport@technimount.com](mailto:technicalsupport@technimount.com) pour obtenir un plan de mesures correctives et rapporter l'incident aux autorités appropriées.

**ATTENTION – Manipulation et utilisation sécuritaires**

- Toujours s'assurer que le Safety MD-Transporter soit correctement installé et sécurisé dans le système de fixation avant que la civière soit déplacée, afin d'éviter tout risque de bris, la chute de l'équipement ou un fonctionnement imprévisible, pouvant causer des blessures graves aux patients, au personnel SMU et clinique.
- Toujours s'assurer que le support de fixation de l'appareil médical soit correctement installé et sécurisé dans le Safety MD-Transporter avant que la civière soit déplacée, afin d'éviter tout risque de bris, la chute de l'équipement ou un fonctionnement imprévisible, pouvant causer des blessures graves aux patients, au personnel SMU et clinique.
- Toujours veiller à **ne pas coincer** les cordons d'alimentation ou les câbles lors de l'installation/du retrait du système de fixation et du support de fixation.

**ATTENTION – Pratique sécuritaire**

- Toujours porter une attention particulière à l'état du mécanisme de sécurité du Safety MD-Transporter, afin d'éviter tout risque de bris, la chute de l'équipement ou un fonctionnement imprévisible, pouvant causer des blessures graves aux patients, au personnel SMU et clinique. Suivre le plan de maintenance et ses directives, tel quelles sont décrites dans le guide de l'utilisateur.
- Toujours s'exercer à utiliser de façon sécuritaire le Safety MD-Transporter jusqu'à ce que les manipulations aient été perfectionnées, avant de l'utiliser avec les patients. Une mauvaise utilisation du système de fixation peut entraîner des dommages ou provoquer la chute de l'équipement ou un fonctionnement imprévisible, pouvant causer des blessures graves aux patients, au personnel SMU et clinique.

**ATTENTION – Charge Maximale d'Utilisation (CMU)/équilibre de la charge**

- **Ne pas surcharger ou dépasser** la Charge Maximale d'Utilisation (CMU) du Safety MD-Transporter, afin d'éviter les incidents de basculement ou les risques d'effondrement. Consulter les « Spécifications techniques » à la page 13 pour les spécifications CMU.
- La Charge Maximale d'Utilisation (CMU) du Safety MD-Transporter **ne remplace pas** la capacité de charge maximale d'un autre produit ou système Technimount, ni celle des appareils médicaux, des accessoires et/ou des accessoires d'équipement médical qui pourraient être placés dans des sacs et des tiroirs, par exemple. Pour respecter la spécification CMU, il convient de prendre en compte l'ensemble de la configuration. Consulter la documentation de l'utilisateur de chaque produit applicable à votre configuration spécifique pour connaître les spécifications.

**ATTENTION – Suivre les instructions d'utilisation**

Toujours consulter vos protocoles internes établis, ainsi que lire et respecter les directives de sécurité indiquées et les instructions fournies dans la documentation de l'utilisateur du Safety MD-Transporter, le système de fixation, le support de fixation, l'appareil médical et la civière.

### 3. Spécifications techniques



Le contenu de cette section est destiné au personnel ayant un niveau de connaissance compétent, chevronné ou avancé. Consulter la section « Compétence de l'utilisateur » à la page 5 au besoin.

|   |  |
|---|--|
| <b>Nom du produit</b>                   | Safety MD-Transporter  |
| <b>Description</b>                      | Système de fixation spécifiquement conçu pour sécuriser et transporter des appareils médicaux et accessoires sur des civières lors du transport aérien ou terrestre des services médicaux d'urgence et des soins critiques   |
| <b>Codes de produit</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Safety MD-Transporter (transport terrestre, vertical, standard) – 540-10-OL13 et Micro Base antirotation (verticale) – 120-20-UN</li> <li>- Safety MD-Transporter (transport aérien, vertical, standard) – 540-00-OL15-FL et Micro Base antirotation (verticale) – 120-20-UN</li> <li>- Safety MD-Transporter (transport terrestre, vertical, court) – 540-10-OL08 et Micro Base antirotation (verticale) – 120-20-UN</li> <li>- Safety MD-Transporter (transport terrestre, horizontal, angulaire) – 540-10-OL14-ANG et Micro Base (horizontale) – 120-20-UN510</li> </ul> |
| <b>Environnement d'opération</b>        | SMU/SC (aérien et terrestre)   |
| <b>Conformités</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Safety MD-Transporter (transport terrestre, vertical, standard) : Testé en conformité avec SAE J3043</li> <li>- Safety MD-Transporter (transport terrestre, vertical, court) : Testé en conformité avec SAE J3043</li> <li>- Safety MD-Transporter (transport aérien, vertical, standard) : Testé en conformité avec 14 CFR 23.561</li> <li>- Safety MD-Transporter (transport terrestre, horizontal, angulaire) : Testé en conformité avec SAE J3043</li> </ul>  |
| <b>Durée de vie prévue</b>              | 5 ans  |
| <b>Civiers compatibles</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stryker Power-Pro XT, modèles 6085-6086, 6500 et 6505</li> <li>- Stryker Power-Pro 2</li> </ul>   |
| <b>Systèmes de fixation compatibles</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Micro Base (transport terrestre et/ou aérien, horizontale)</li> <li>- IV Pro Adapter 2-SMDT (transport terrestre, horizontal)</li> </ul>  |
| <b>Supports de fixation compatibles</b> | Ligne de produits Bracket Pro Serie avec micro disques et/ou micro disques antirotation  |
| <b>Dimensions (L X P X H)</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Safety MD-Transporter (vertical, standard) : 100,08 mm X 86,36 mm X 479,04 mm (3,94 po X 3,4 po X 18,86 po)</li> <li>- Safety MD-Transporter (vertical, court) : 100,08 mm X 86,36 mm X 225,04 mm (3,94 po X 3,4 po X 8,86 po)</li> <li>- Safety MD-Transporter (horizontal, angulaire) : 100,08 mm X 151,13 mm X 282,7 mm (3,94 po X 5,95 po X 11,13 po)</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Poids</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Safety MD-Transporter (vertical, standard) : 1,69 kg (3,72 lb)</li> <li>- Safety MD-Transporter (vertical, court) : 1,34 kg (2,96 lb)</li> <li>- Safety MD-Transporter (horizontal, angulaire) : 1,27 kg (2,8 lb)</li> </ul>   |
| <b>Composition</b>                                  | Aluminium   |
| <b>Charges Maximales d'Utilisation (CMU)</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Safety MD-Transporter (transport terrestre, vertical, standard) : 18,6 kg (41 lb)</li> <li>- Safety MD-Transporter (transport terrestre, vertical, court) : 14,56 kg (32,1 lb)</li> <li>- Safety MD-Transporter (transport aérien, vertical, standard) : 18,6 kg (41 lb)</li> <li>- Safety MD-Transporter (transport terrestre, horizontal, angulaire) : 11,34 kg (25 lb)</li> </ul> |
| <b>Température de fonctionnement</b>                | - 35° C à 45° C (- 31° F à 113° F)  |
| <b>Solutions de nettoyage testées et approuvées</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oxivir, Peroxyde d'hydrogène 5% avec acide peracétique (AHP)</li> <li>- Lavo 12, Hypochlorite de Sodium 10 000 ppm</li> <li>- TNT-100, Ammonium Quaternaires 5%</li> <li>- Spectro-Sept, Alcool Éthylique 5%</li> <li>- Spectrol, Sel d'EDTA 5%</li> </ul>   |
| <b>Options</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Micro Base (transport terrestre, horizontale) – 120-20-UN-510</li> <li>- Micro Base (transport aérien, horizontale) – 120-20-UN-510-FL</li> </ul>  |


#### 4. Illustrations d'orientation




Le contenu de cette section est destiné au personnel ayant un niveau de connaissance compétent, chevronné ou avancé. Consulter la section « Compétence de l'utilisateur » à la page 5 au besoin.

**REMARQUE :** Les orientations de référence dans ce document sont du point de vue du personnel SMU et clinique, quand ils font face au Safety MD-Transporter.


Avant du système de fixation

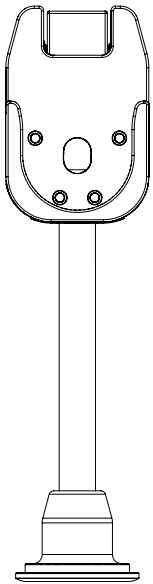

Modèle vertical,  
standard

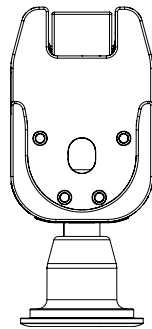


Modèle  
vertical, court

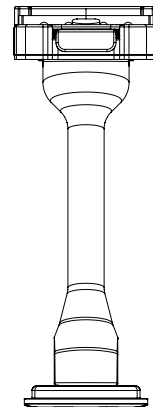


Modèle horizontal,  
angulaire


Arrière du système de fixation

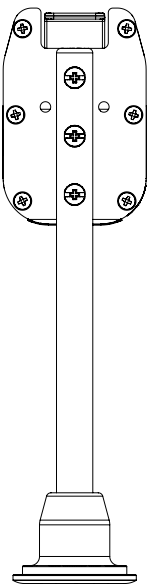

Modèle vertical,  
standard

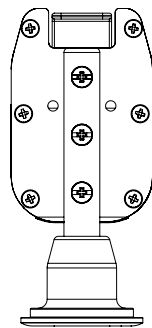

Modèle  
vertical, court

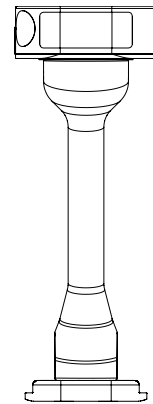


Modèle horizontal,  
angulaire

**Figure 2:** Illustrations d'orientation du Safety MD-Transporter

## 5. Pièces illustrées



Le contenu de cette section est destiné au personnel ayant un niveau de connaissance compétent, chevronné ou avancé. Consulter la section « Compétence de l'utilisateur » à la page 5 au besoin.

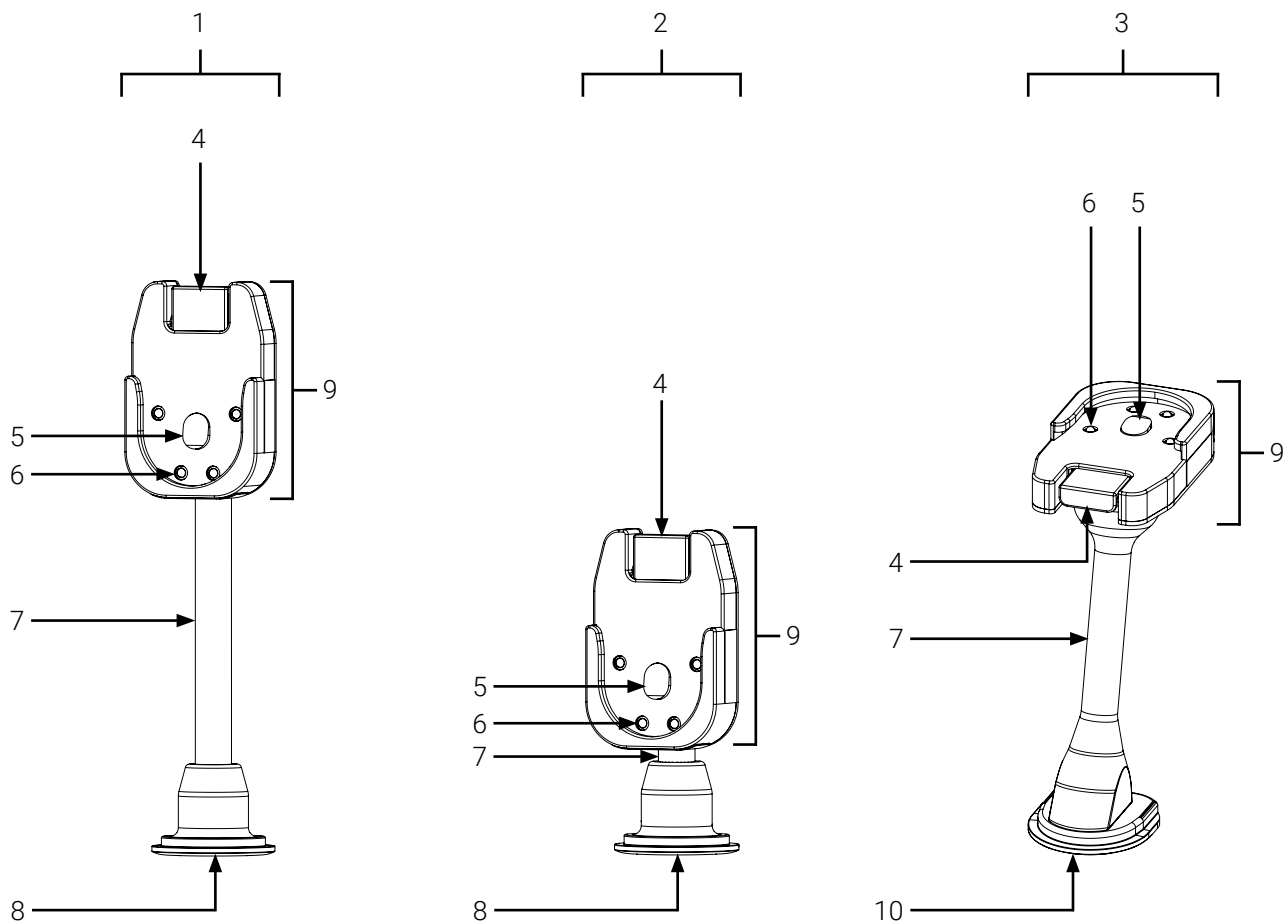


- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Safety MD-Transporter (vertical, standard)    | 6. Plongeur (4X)              |
| 2. Safety MD-Transporter (vertical, court)       | 7. Poteau                     |
| 3. Safety MD-Transporter (horizontal, angulaire) | 8. Micro disque               |
| 4. Bouton à déclenchement rapide                 | 9. Micro Base                 |
| 5. Mécanisme de verrouillage                     | 10. Micro disque antirotation |

**Figure 3:** Composants du Safety MD-Transporter


## 6. Spécifications illustrées




Le contenu de cette section est destiné au personnel ayant un niveau de connaissance compétent, chevronné ou avancé. Consulter la section « Compétence de l'utilisateur » à la page 5 au besoin.

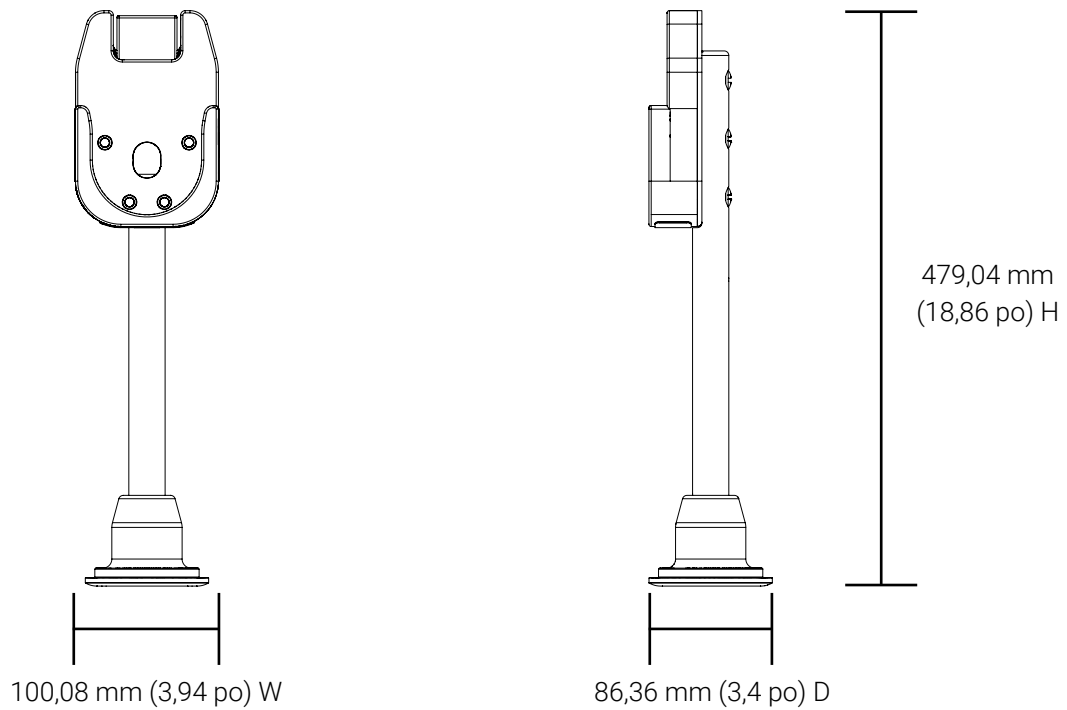

**Figure 4:** Dimensions du Safety MD-Transporter (vertical, standard)

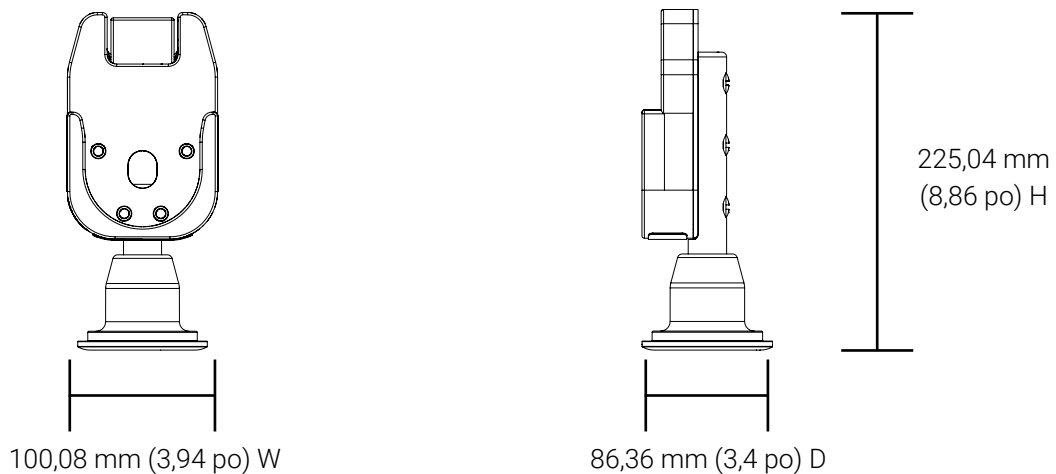

**Figure 5:** Dimensions du Safety MD-Transporter (vertical, court)

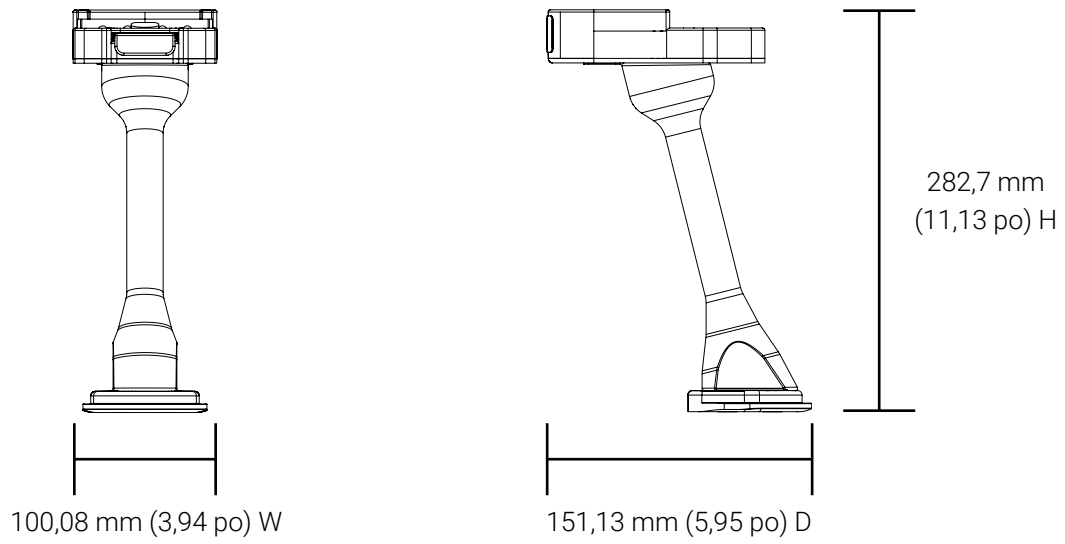

**Figure 6:** Dimensions du Safety MD-Transporter (horizontal, angulaire)


## 7. Mécanisme de sécurité




Le contenu de cette section est destiné au personnel ayant un niveau de connaissance compétent, chevronné ou avancé. Consulter la section « Compétence de l'utilisateur » à la page 5 au besoin.

Le mécanisme de verrouillage est composé d'un mécanisme de verrouillage et d'un bouton à déclenchement rapide. Le mécanisme de verrouillage s'active lorsque le disque du support de fixation est inséré dans le Safety MD-Transporter. Lorsque le disque est poussé vers l'arrière du système de fixation, il glisse sur les plongeurs intégrés, jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage s'insère dans la cavité du disque. Au son du clic, le Safety MD-Transporter est verrouillé et le support de fixation est sécurisé. Le mécanisme de verrouillage est désactivé lorsque le bouton à déclenchement rapide est poussé. Consulter les « Spécifications techniques » à la page 13 pour les supports de fixation compatibles et les « Mesures de sécurité » à la page 11 au besoin.

- **Pour verrouiller** le Safety MD-Transporter, aligner et insérer le micro disque situé à l'arrière du support de fixation dans la Micro Base verticalement (Figure 7) ou dans le micro disque antirotation situé sous le support de fixation dans la Micro Base horizontalement (Figure 8) jusqu'à ce vous entendiez le son du clic.

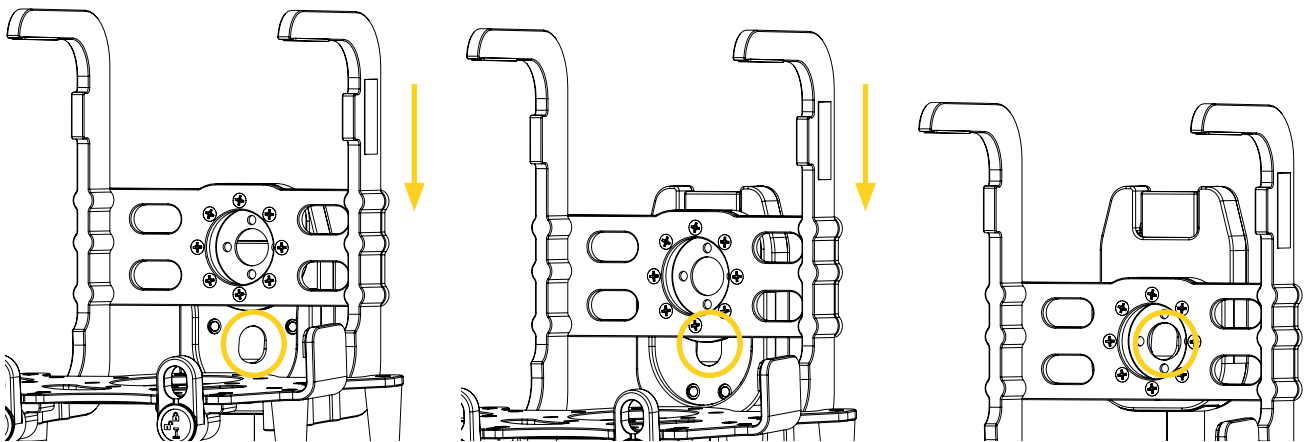


**Figure 7:** Verrouillage du Safety MD-Transporter (vertical, standard/court)

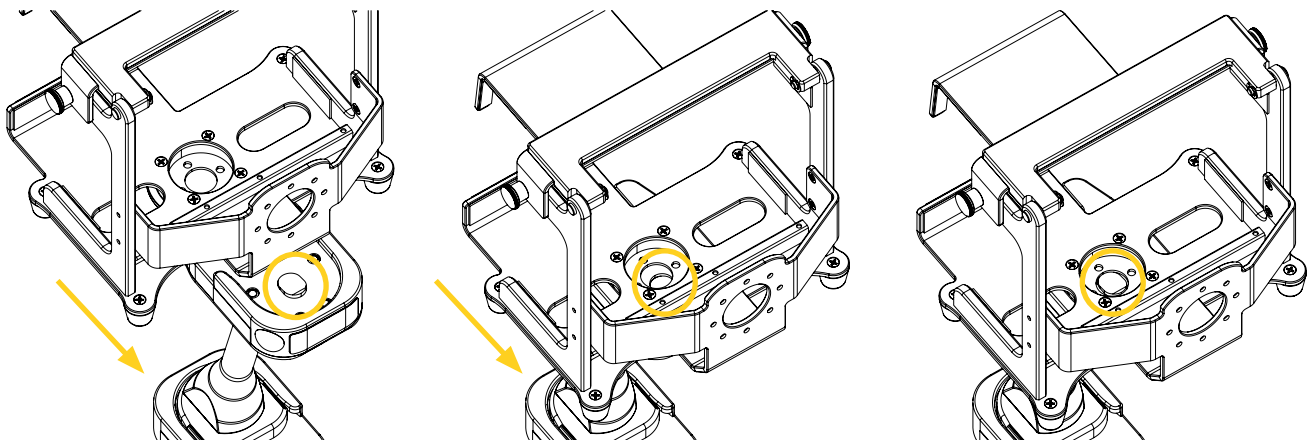


**Figure 8:** Verrouillage du Safety MD-Transporter (horizontal, angulaire)

- **Pour déverrouiller** le Safety MD-Transporter, pousser et maintenir enfoncé le bouton à déclenchement rapide, puis tirer sur le support de fixation verticalement (Figure 9) ou horizontalement (Figure 10) jusqu'à ce que le disque soit sorti du système de fixation. Relâcher le bouton à déclenchement rapide.

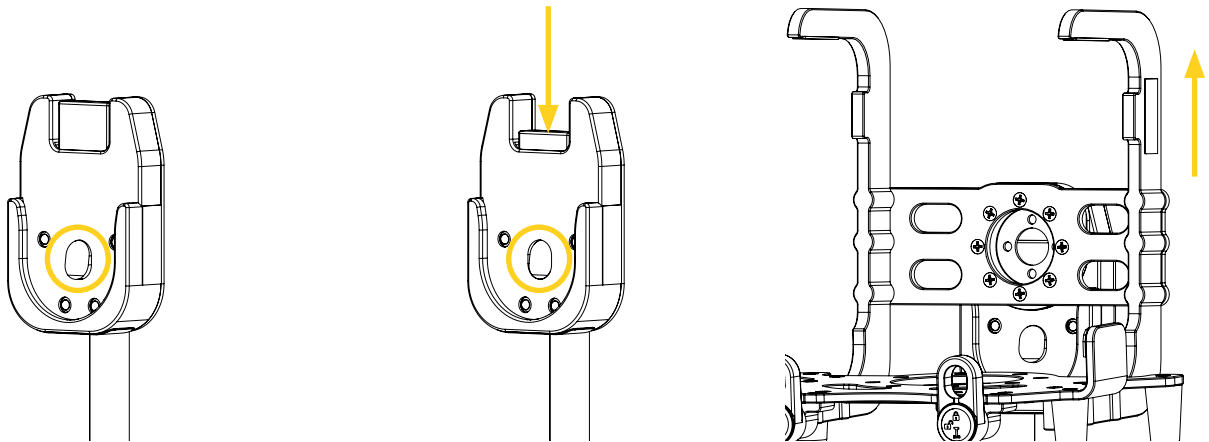

**Figure 9:** Déverrouillage du Safety MD-Transporter (vertical, standard/court)

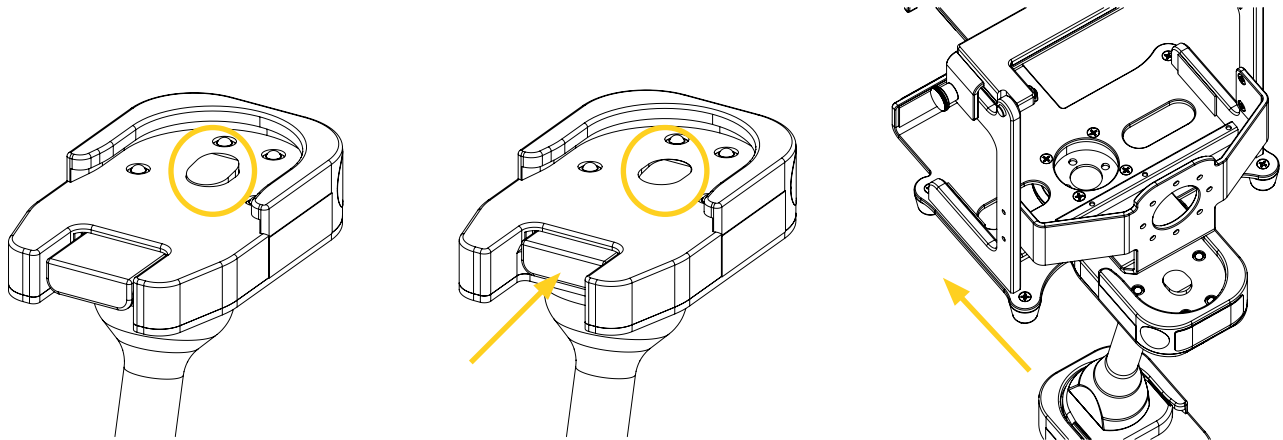

**Figure 10:** Déverrouillage du Safety MD-Transporter (horizontal, angulaire)

## 8. Utiliser le Safety MD-Transporter




Le contenu de cette section est destiné au personnel ayant un niveau de connaissance compétent, chevronné ou avancé. Consulter la section « Compétence de l'utilisateur » à la page 5 au besoin.


**REMARQUE :** Les illustrations présentées dans cette section ont pour but de faciliter la compréhension de l'utilisateur et peuvent différer de votre configuration. Les instructions fournies ici s'appliquent à tous les systèmes de fixation et supports de fixation compatibles. Consulter les guides de l'utilisateur pour les directives de sécurité et l'utilisation sécuritaire au besoin.

### 8.1. Installer le Safety MD-Transporter dans la Micro Base

1. Aligner et insérer le micro disque (Figure 11) ou le micro disque antirotation (Figure 12) du Safety MD-Transporter dans la Micro Base jusqu'à ce qu'il se verrouille. Consulter la section « Mécanisme de sécurité » à la page 19 au besoin.

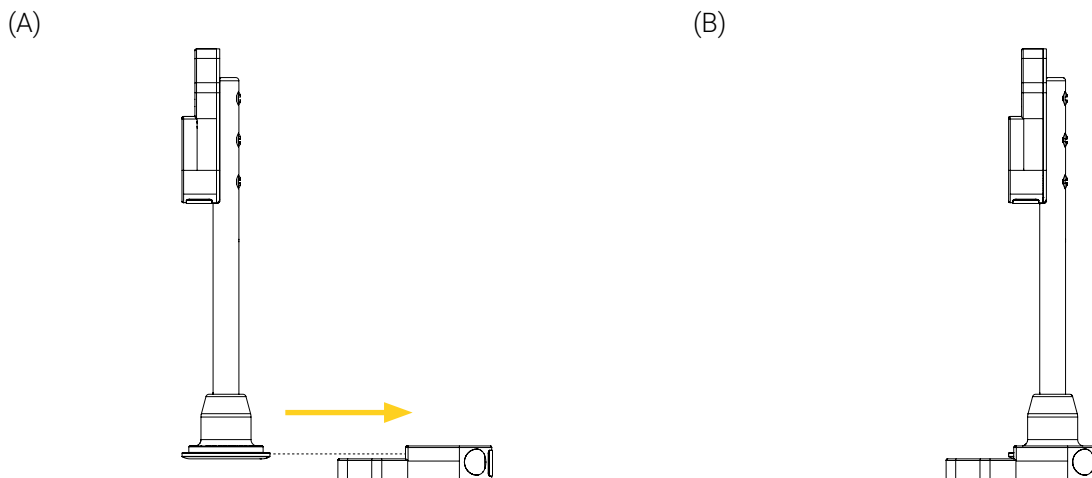

**Figure 11:** Installation du Safety MD-Transporter dans la Micro Base (vertical, standard/court)

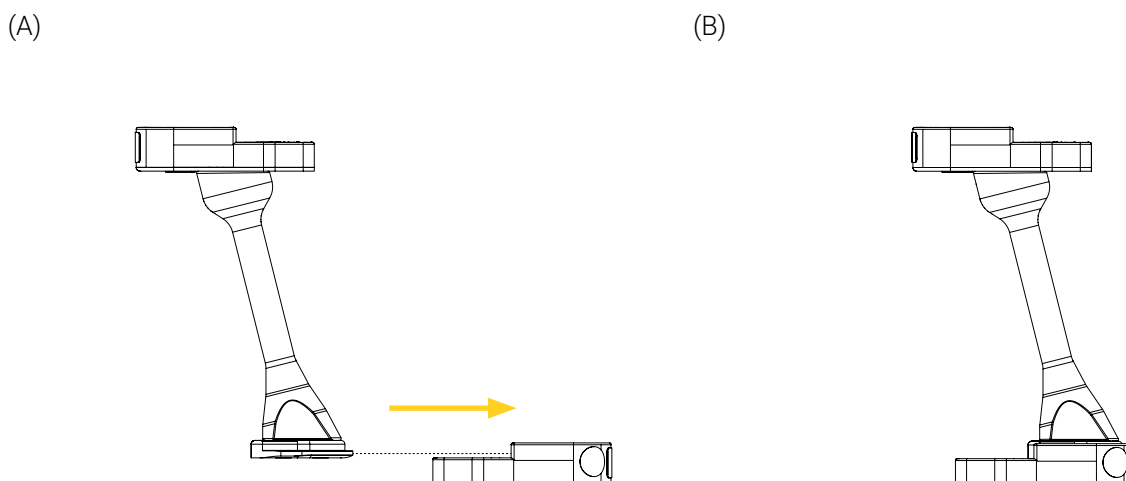


**Figure 12:** Installation du Safety MD-Transporter dans la Micro Base (horizontal, angulaire)

2. Déplacer le Safety MD-Transporter d'avant à arrière à quelques reprises afin de s'assurer qu'il soit correctement verrouillé et sécurisé dans la Micro Base. Si le système de fixation reste dans la base après la vérification, il est correctement verrouillé et sécurisé.


L'installation du Safety MD-Transporter dans la Micro Base est complétée.

## 8.2. Retirer le Safety MD-Transporter de la Micro Base

1. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton à déclenchement rapide de la Micro Base, puis glisser le micro disque (Figure 13) ou le micro disque antirotation (Figure 14) hors de la base horizontalement.

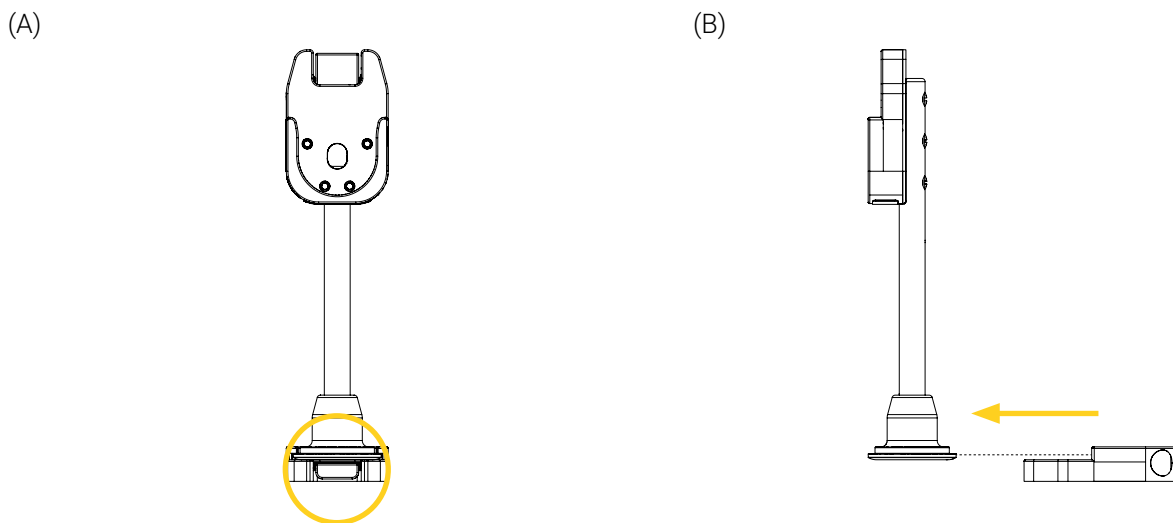

**Figure 13:** Retrait du Safety MD-Transporter de la Micro Base (vertical, standard/court)

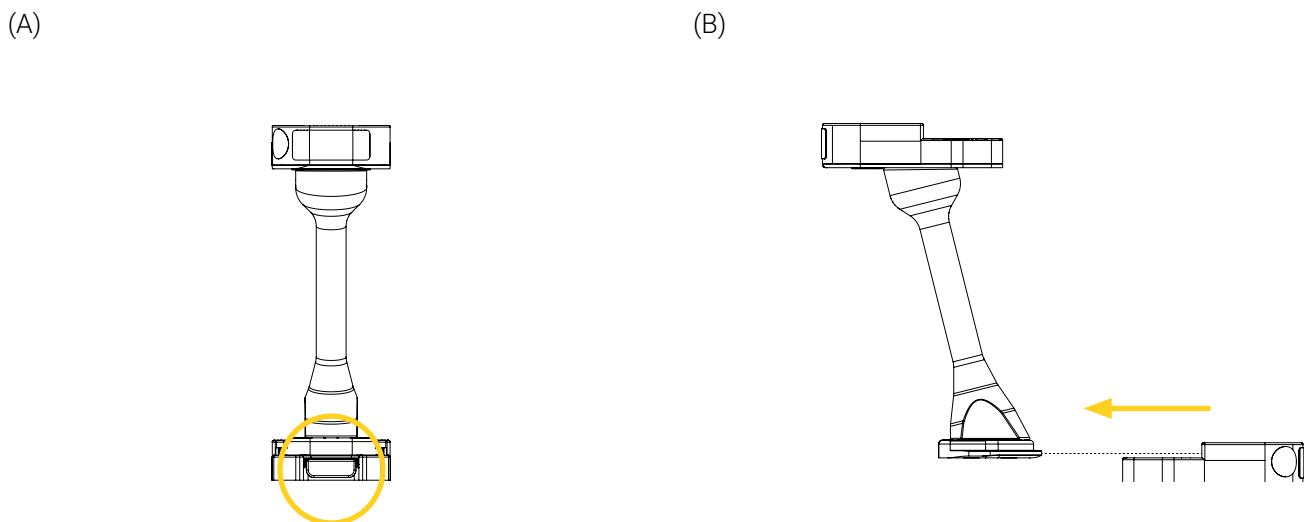


**Figure 14:** Retrait du Safety MD-Transporter de la Micro Base (horizontal, angulaire)

2. Mettre le système de fixation de côté sur une surface propre, ou le ranger dans son espace dédié. Consulter vos protocoles internes établis au besoin.


Le retrait du Safety MD-Transporter de la Micro Base est complété.

### 8.3. Installer l'appareil médical dans le Safety MD-Transporter

1. Aligner et insérer le micro disque antirotation situé à l'arrière du support de fixation de l'appareil médical dans le Safety MD-Transporter verticalement (Figure 15) ou le micro disque situé sous le support de fixation de l'appareil médical dans le Safety MD-Transporter horizontalement (Figure 16) jusqu'à ce qu'il se verrouille.

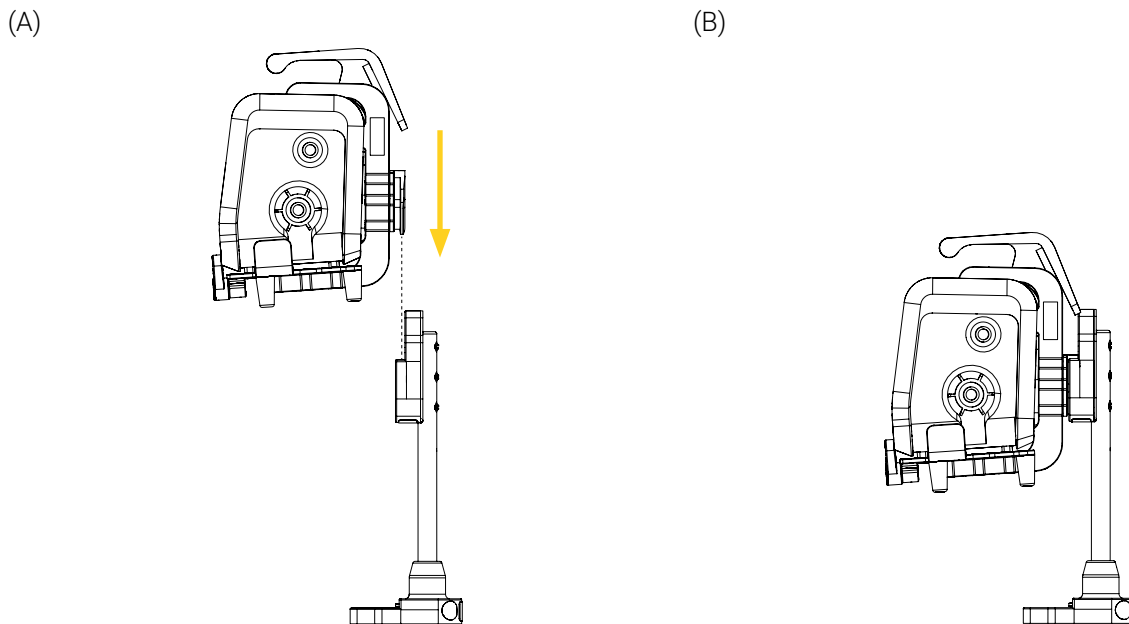


**Figure 15:** Installation de l'appareil médical dans le Safety MD-Transporter (vertical, standard/court)

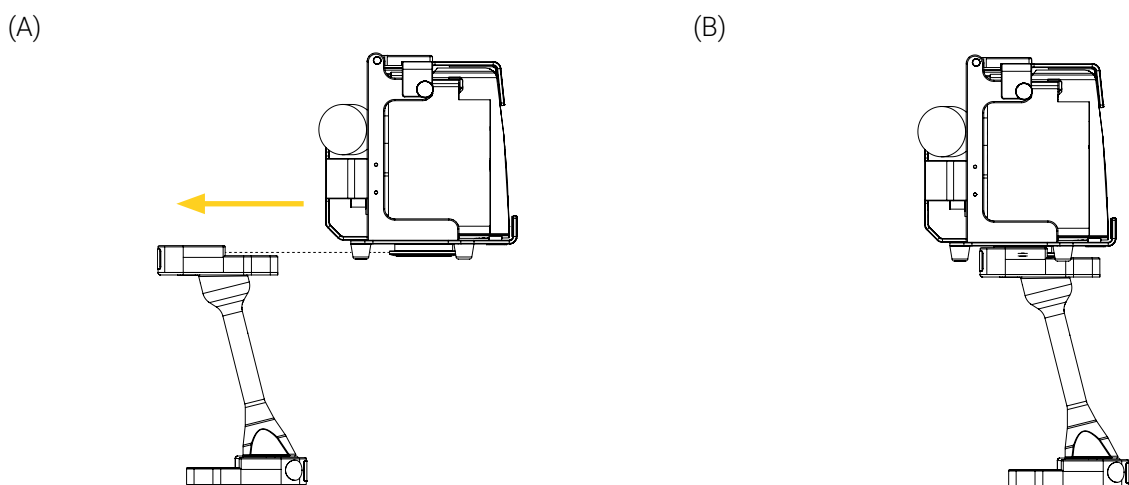


**Figure 16:** Installation de l'appareil médical dans le Safety MD-Transporter (horizontal, angulaire)

2. Déplacer l'appareil médical de haut en bas et/ou d'avant à arrière à quelques reprises afin de s'assurer qu'il soit correctement verrouillé et sécurisé dans le Safety MD-Transporter. Si l'appareil médical reste dans le système de fixation après la vérification, il est correctement verrouillé et sécurisé.

3. Tourner l'appareil médical jusqu'à 360 ° dans le sens horaire ou antihoraire, jusqu'à la position désirée (Figure 17 et Figure 18).

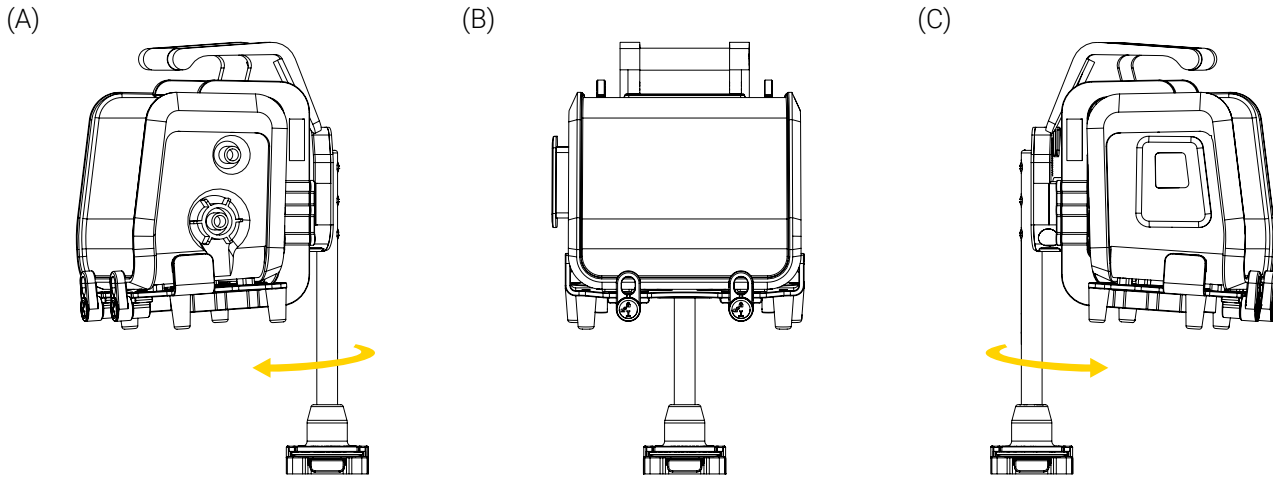

**Figure 17:** Rotation de l'appareil médical (vertical, standard/court)

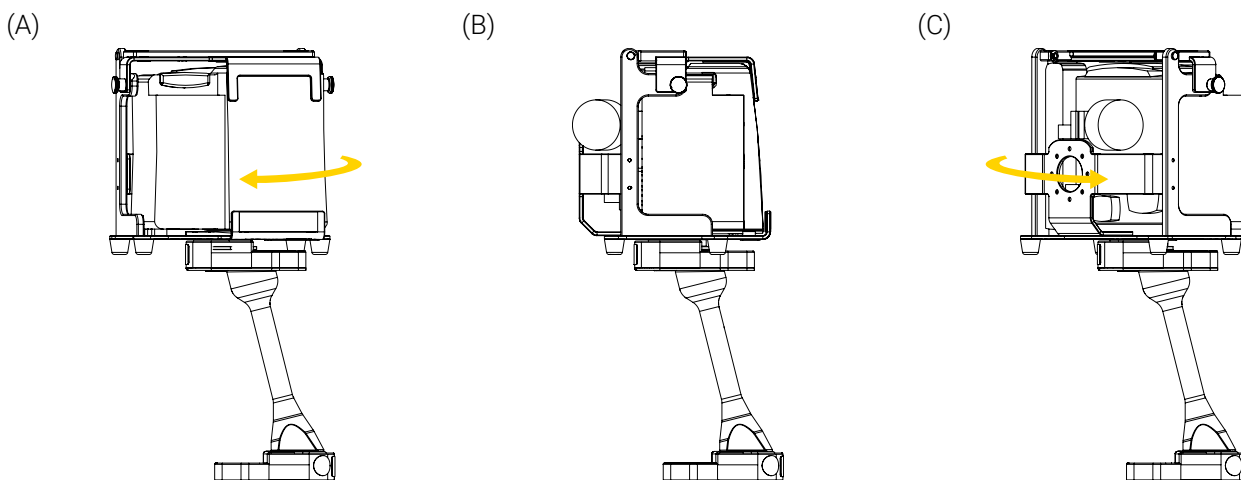


**Figure 18:** Rotation de l'appareil médical (horizontal, angulaire)

L'installation de l'appareil médical dans le Safety MD-Transporter est complétée.


#### 8.4. Retirer l'appareil médical du Safety MD-Transporter

1. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton à déclenchement rapide du Safety MD-Transporter, puis tirer le support de fixation de l'appareil médical verticalement (Figure 19) ou horizontalement (Figure 20) jusqu'à ce que le disque soit sorti du système de fixation.

(A)

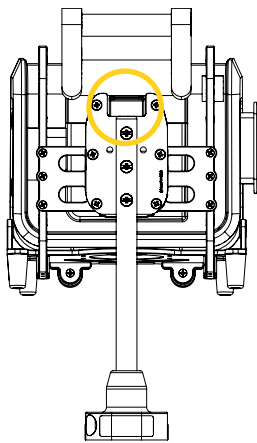


(B)

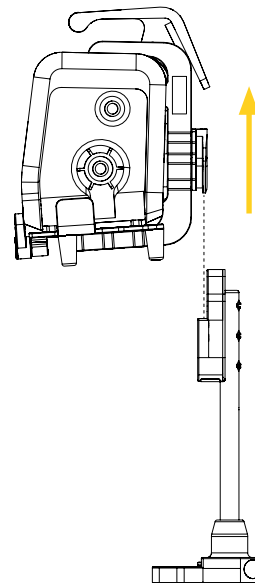


**Figure 19:** Retrait de l'appareil médical du Safety MD-Transporter (vertical, standard/court)

(A)

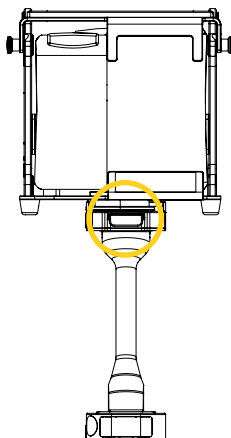

(B)

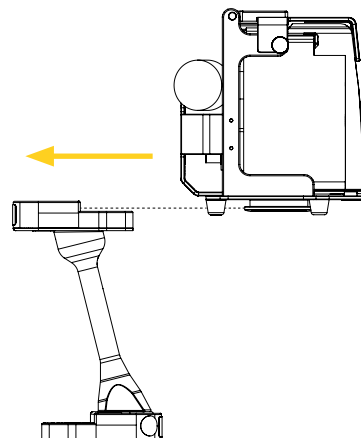

**Figure 20:** Retrait de l'appareil médical du Safety MD-Transporter (horizontal, angulaire)

2. Mettre l'appareil médical de côté sur une surface propre, ou le ranger dans son espace dédié. Consulter vos protocoles internes établis au besoin.

Le retrait de l'appareil médical du Safety MD-Transporter est complété.

## Annexe I Évaluation des compétences du personnel SMU et clinique



Le contenu de cette section est destiné au personnel ayant un niveau de connaissance chevronné. Consulter la section « Compétence de l'utilisateur » à la page 5 au besoin.

Suite à la formation, chaque membre du personnel SMU et clinique doit faire l'objet d'une évaluation des compétences afin de s'assurer son entière compréhension de l'étiquetage, des avertissements et des attentions, les risques potentiels, les pratiques sécuritaires et les procédures d'opération requises pour l'utilisation sécuritaire du Safety MD-Transporter. Considérer l'ajout des éléments suivants à vos protocoles de formation interne.

Nom de la personne en formation : \_\_\_\_\_ Unité : \_\_\_\_\_  
 Nom de l'évaluateur : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

### ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL SMU ET CLINIQUE

#### CRITÈRES DE COMPÉTENCE

RÉUSSI

ÉCHOUÉ

#### Étiquetage

- Capable d'identifier la signification et les risques potentiels associés aux différentes étiquettes de sécurité :
  - Étiquette manufacturière
  - Charge Maximale d'Utilisation (CMU)

#### Mesures de sécurité

- Sait qu'**en aucun cas**, le Safety MD-Transporter ne doit être installé sur, connecté à ou utilisé en combinaison avec un système de fixation, une base, ou un équipement similaire d'un tiers/concurrent.
- Sait que le Safety MD-Transporter a été conçu et testé exclusivement pour être utilisé avec des composants et des systèmes Technimount approuvés et compatibles et que l'utilisation de systèmes non autorisés et/ou incompatibles peut entraîner la chute de l'équipement, un fonctionnement imprévisible ou une défaillance.
- Sait qu'**il ne faut pas utiliser** le Safety MD-Transporter si les vis sont desserrées ou manquantes.
- Sait qu'il faut cesser immédiatement d'utiliser le Safety MD-Transporter si un incident grave survient et informer le personnel autorisé.
- Sait qu'il faut toujours s'assurer que le Safety MD-Transporter soit correctement installé et sécurisé dans le système de fixation avant que la civière soit déplacée.
- Sait qu'il faut toujours s'assurer que le support de fixation de l'appareil médical soit correctement installé et sécurisé dans le Safety MD-Transporter avant que la civière soit déplacée.

**ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL SMU ET CLINIQUE**

| CRITÈRES DE COMPÉTENCE  | RÉUSSI                   | ÉCHOUÉ                   |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Sait qu'il faut toujours veiller à <b>ne pas coincer</b> les cordons d'alimentation ou les câbles lors de l'installation/du retrait du système de fixation et du support de fixation.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Sait qu'il faut toujours porter une attention particulière à l'état du mécanisme de sécurité du Safety MD-Transporter.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Sait qu'il faut toujours s'exercer à utiliser de façon sécuritaire le Safety MD-Transporter jusqu'à ce que les manipulations aient été perfectionnées, avant de l'utiliser avec les patients et qu'une mauvaise utilisation du système de fixation peut entraîner des dommages ou provoquer la chute de l'équipement ou un fonctionnement imprévisible. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Sait qu' <b>il faut pas surcharger ou dépasser</b> la Charge Maximale d'Utilisation (CMU) du Safety MD-Transporter.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Sait que la Charge Maximale d'Utilisation (CMU) du Safety MD-Transporter <b>ne remplace pas</b> la capacité de charge maximale d'un autre produit ou système Technimount, ni celle des appareils médicaux, des accessoires et/ou des accessoires d'équipement médical qui pourraient être placés dans des sacs et des tiroirs, par exemple.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Sait qu'il faut toujours consulter vos protocoles internes établis, ainsi que lire et respecter les directives de sécurité indiquées et les instructions fournies dans la documentation de l'utilisateur du Safety MD-Transporter, le système de fixation, le support de fixation, l'appareil médical et la civière.                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Opération</b>  |                          |                          |
| - Capable d'installer/retraiter le Safety MD-Transporter dans/de la Micro Base.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Capable d'installer/retraiter l'appareil médical dans/du Safety MD-Transporter.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Capable de tourner l'appareil médical.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Annexe II      Déballer le Safety MD-Transporter



Le contenu de cette section est destiné au personnel ayant un niveau de connaissance avancé. Consulter la section « Compétence de l'utilisateur » à la page 5 au besoin.

1. Avant d'accepter l'expédition, inspecter la ou les boîtes d'expédition à la recherche de signes de dommages. Prendre des photos et les signaler rapidement, lorsqu'applicable.
2. Déplacer la ou les boîtes d'expédition à l'emplacement de l'installation.
3. Ouvrir la ou les boîtes d'expédition.
4. Déballer la ou les boîtes et s'assurer que tout le matériel d'expédition et d'emballage a été retiré correctement avant l'installation.

**REMARQUE :** Conserver tout le matériel d'emballage pour une utilisation ultérieure.

5. Identifier les items inclus dans la/les boîte(s) d'expédition pour l'installation, puis les mettre de côté.
6. Inspecter les items pour déceler des signes de dommages. Prendre des photos et les signaler rapidement, lorsqu'applicable.

## Annexe III Maintenance



Le contenu de cette section est destiné au personnel ayant un niveau de connaissance avancé. Consulter la section « Compétence de l'utilisateur » à la page 5 au besoin.

Des facteurs tels que la météo, l'environnement, l'emplacement géographique et l'utilisation individuelle nécessiteront des besoins différents. Pour la maintenance du Safety MD-Transporter, suivre les directives indiquées dans le présent guide de l'utilisateur, conformément à vos pratiques de maintenance actuelles et vos protocoles internes établis. Communiquer avec le support technique à l'adresse [techsupport@technimount.com](mailto:techsupport@technimount.com) pour tout problème lié aux pièces de rechange ou à la réparation.



### **AVERTISSEMENT – Avertissement général**

- **Ne pas effectuer** de vérifications de sécurité ni de maintenance basée sur l'état avant d'avoir lu la section « Mesures de sécurité » à la page 11, ainsi que les mesures de sécurité spécifiques à la maintenance de cette section, d'avoir lu toute la documentation utilisateur, d'avoir acquis les connaissances et une compréhension approfondie sur le produit, et de s'être familiarisé avec les standards et les directives.
- Des vérifications de sécurité et une maintenance basée sur l'état sont requis et doivent être établis pour tous les produits Technimount.
- Effectuer les vérifications de sécurité et les opérations de maintenance, comme décrit dans ce guide de l'utilisateur. Le non-respect du plan de maintenance recommandé ou de ses directives peut entraîner des dommages prématurés au produit.
- Utiliser uniquement les pièces Technimount, les procédures de maintenance, les solutions de nettoyage et les lubrifiants (lorsqu'applicable), comme décrit dans le présent guide de l'utilisateur. L'utilisation de pièces ou de procédures modifiées non approuvées pour l'installation, l'utilisation ou la maintenance du produit Technimount peut rendre le système instable et causer des blessures aux patients ou au personnel SMU et clinique et annuler la garantie du produit.
- Remplacer les pièces endommagées ou usées si elles ont dépassé leur durée de vie prévue ou si elles sont endommagées (consulter la section « Pièces/ensemble de remplacement » à la page 36). Recycler les pièces endommagées ou les éliminer conformément aux lois environnementales qui s'appliquent à votre juridiction et consulter les fiches signalétiques de sécurité (FSS).

**ATTENTION – Manipulation et utilisation sécuritaires**

- **Ne pas utiliser** des solutions de nettoyage ou des désinfectants qui sont non autorisées, non testées ou non approuvées, afin d'éviter d'endommager la surface de votre produit Technimount et d'annuler la garantie. Technimount ne sera pas tenu responsable des dommages encourus par l'utilisation d'une solution de nettoyage non autorisée, non testée ou non approuvée.
- **Ne pas utiliser** d'outils électriques pour visser le matériel lors de l'installation, car il y a un risque d'endommager les filets.
- **Ne pas nettoyer** à la vapeur et **n'utiliser pas** de produits de nettoyage à ultrasons sur le système ni sur un de ses composants.
- **Ne pas immerger** les pièces ou les composants métalliques dans l'eau.
- Pour éliminer les taches, la température maximale de l'eau ne doit pas dépasser 82 °C (180 °F). La pression maximale de l'eau ne doit pas dépasser 1500 psi/103,5 BAR. Si un nettoyeur à haute pression est utilisé, la buse de pression doit être maintenue à au moins 609,6 mm (24 po) du produit.
- Lors du nettoyage, utiliser toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié en fonction de vos protocoles internes établis (p. ex., gants, lunettes, etc.).

**ATTENTION – Corrosion**

- Toujours rincer et sécher correctement le Safety MD-Transporter après avoir utilisé des produits de nettoyage. Certains produits de nettoyage sont corrosifs de nature et peuvent endommager le produit s'ils ne sont pas utilisés correctement. Consulter les fiches signalétiques de sécurité (FSS) du produit pour obtenir des renseignements sur les produits chimiques ou sur la manipulation, l'entreposage et les mesures d'urgence en cas d'accident.
- Éliminer les déchets corrosifs conformément aux lois environnementales qui s'appliquent à votre juridiction et consulter les fiches signalétiques de sécurité (FSS).

**ATTENTION – Suivre les instructions d'utilisation**

Toujours lire et respecter toutes les directives de sécurité indiquées, en plus de suivre toutes les instructions fournies dans la documentation de l'utilisateur du produit de nettoyage.

### Fréquence de maintenance

- Les vérifications de sécurité et les maintenances basées sur l'état doivent être effectuées au minimum tous les mois ou aussi souvent que nécessaire, afin de prolonger la longévité du Safety MD-Transporter dans des conditions optimales.
- Décontaminer le Safety MD-Transporter selon les recommandations de vos protocoles internes établis, ainsi que les réglementations et les normes en vertu des procédures de prévention et de contrôle des infections.

### Outils fournis par le client

- Linge sec et propre
- Brosse douce
- Nettoyeur à pression
- Solutions de nettoyage
- Tournevis à tête Phillips
- Adhésif frein-filet de force élevée (🔥)

### Solutions de nettoyage testées et approuvées

- Oxivir, Peroxyde d'hydrogène 5% avec acide peracétique (AHP)
- Lavo 12, Hypochlorite de Sodium 10 000 ppm
- TNT-100, Ammonium Quaternaires 5%
- Spectro-Sept, Alcool Éthylique 5%
- Spectrol, Sel d'EDTA 5%

## Plan de maintenance

1. Cocher les boîtes après avoir complété les « Vérifications de sécurité » à la page 32 et la « Maintenance basée sur l'état » à la page 33, puis ajouter vos commentaires et/ou observations dans le « Journal de maintenance » à la page 34 au besoin. En cas de non-conformité, cesser d'utiliser le Safety MD-Transporter et contacter immédiatement le support technique à l'adresse [techsupport@technimount.com](mailto:techsupport@technimount.com) pour obtenir un plan de mesures correctives.
2. Conserver un registre de vos activités de maintenance.

## VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ

## VÉRIFIÉS

### Safety MD-Transporter (Figure 21)

- Inspecter visuellement tous les composants du Safety MD-Transporter afin de s'assurer que la visserie est en bon état et qu'il n'y a pas de vis desserrées. 
  - *Si la visserie n'est pas en bonne condition, la remplacer. Contacter le support technique au besoin.*
  - *Si les vis sont desserrées, les serrer. Consulter le guide d'utilisation de la Micro Base.*
- Inspecter visuellement tous les composants du Safety MD-Transporter afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'attaques chimiques. 
  - *S'il y a des traces d'attaques chimiques, nettoyer le système de fixation. Consulter la section « Maintenance basée sur l'état » à la page 33 au besoin.*
- Appuyer sur et relâcher le mécanisme de verrouillage à quelques reprises afin de s'assurer du bon fonctionnement du mécanisme de sécurité de Safety MD-Transporter. 
  - *Si le mécanisme de verrouillage ne s'insère pas facilement ou qu'il y a une résistance lorsqu'il est inséré, il y a une non-conformité.*
  - *Si le mécanisme de verrouillage ne se rétracte pas facilement ou à un minimum de 1/8 po (H) lorsqu'il est relâché, il y a une non-conformité.*
- Appuyer sur et relâcher le bouton à déclenchement rapide à quelques reprises afin de s'assurer du bon fonctionnement du mécanisme de sécurité de Safety MD-Transporter. 
  - *Si le bouton ne s'insère pas facilement ou qu'il y a une résistance lorsqu'il est inséré, il y a une non-conformité.*
  - *Si le bouton ne se rétracte pas facilement lorsqu'il est relâché, il y a une non-conformité.*
- Appuyer sur et relâcher chaque plongeurs à quelques reprises afin de s'assurer du bon fonctionnement du mécanisme de sécurité de la Micro Base. 
  - *Si les plongeurs ne s'insèrent pas facilement ou qu'ils restent collés dans la base lorsqu'ils sont insérés, nettoyer le système de fixation et lubrifier les plongeurs. Consulter la section « Maintenance basée sur l'état » à la page 33 au besoin.*
- Installer et retirer le support de fixation dans le Safety MD-Transporter à quelques reprises afin de s'assurer du bon fonctionnement du mécanisme de sécurité de système de fixation. 
  - *Si le disque du support de fixation ne s'insère pas facilement dans la base ne se verrouille pas, et/ou ne peut être facilement retiré à l'aide du bouton à déclenchement rapide de la base, il y a une non-conformité.*

**VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ****VÉRIFIÉS**

- Installer le support de fixation dans le Safety MD-Transporter le tourner dans le sens horaire et antihoraire à quelques reprises afin de s'assurer du bon fonctionnement du mécanisme du système de fixation. 
  - *Si le support de fixation ne tourne pas facilement de gauche à droite ou qu'une résistance est ressentie, il y a une non-conformité.*
- Installer et retirer le Safety MD-Transporter dans/de la Micro Base à quelques reprises afin de s'assurer du bon fonctionnement du mécanisme de sécurité de système de fixation. 
  - *Si le disque du Safety MD-Transporter ne s'insère pas facilement dans la base ne se verrouille pas, et/ou ne peut être facilement retiré à l'aide du bouton à déclenchement rapide de la base, il y a une non-conformité.*
- Regarder l'étiquette manufacturière afin de s'assurer que votre Safety MD-Transporter n'a pas dépassé sa durée de vie prévue. Consulter la section « Étiquettes » à la page 10 et la section des « Spécifications techniques » à la page 13 au besoin. 
  - *Si la période estimée d'utilisation sécuritaire et fiable est dépassée, il y a une non-conformité.*

**MAINTENANCE BASÉE SUR L'ÉTAT****VÉRIFIÉS**

Nettoyer le Safety MD-Transporter, après avoir complété les vérifications de sécurité :

1. Enlever l'excès de saleté à l'aide d'un linge propre, au besoin.
2. Enlever les contaminants à l'aide d'un nettoyeur à pression ou tel que recommandé dans vos protocoles internes établis et procédures de contrôles.
3. Nettoyer à l'aide d'une solution de nettoyage et d'un linge propre.
4. Laisser la solution reposer sur la surface pour retirer les taches, au besoin.

**REMARQUE :** Éviter la sursaturation et veiller à ce que le produit **ne reste pas** sur la surface du Safety MD-Transporter plus longtemps que ce qui est recommandé par le fabricant du nettoyant.

5. Rincer soigneusement la solution avec un linge propre imbibé d'eau tiède, puis sécher tous les composants avec un linge propre avant de les remettre en service.

Nettoyer la Micro Base, après avoir complété la maintenance basée sur l'état du Safety MD-Transporter.

## JOURNAL DE MAINTENANCE

Ajouter vos commentaires et observations, suite aux vérifications de sécurité et à la maintenance basée sur l'état, au besoin :


Plan de maintenance complété le (jj/mm/aaaa) :

---

Plan de maintenance complétée par :

---

Points d'inspection illustrés

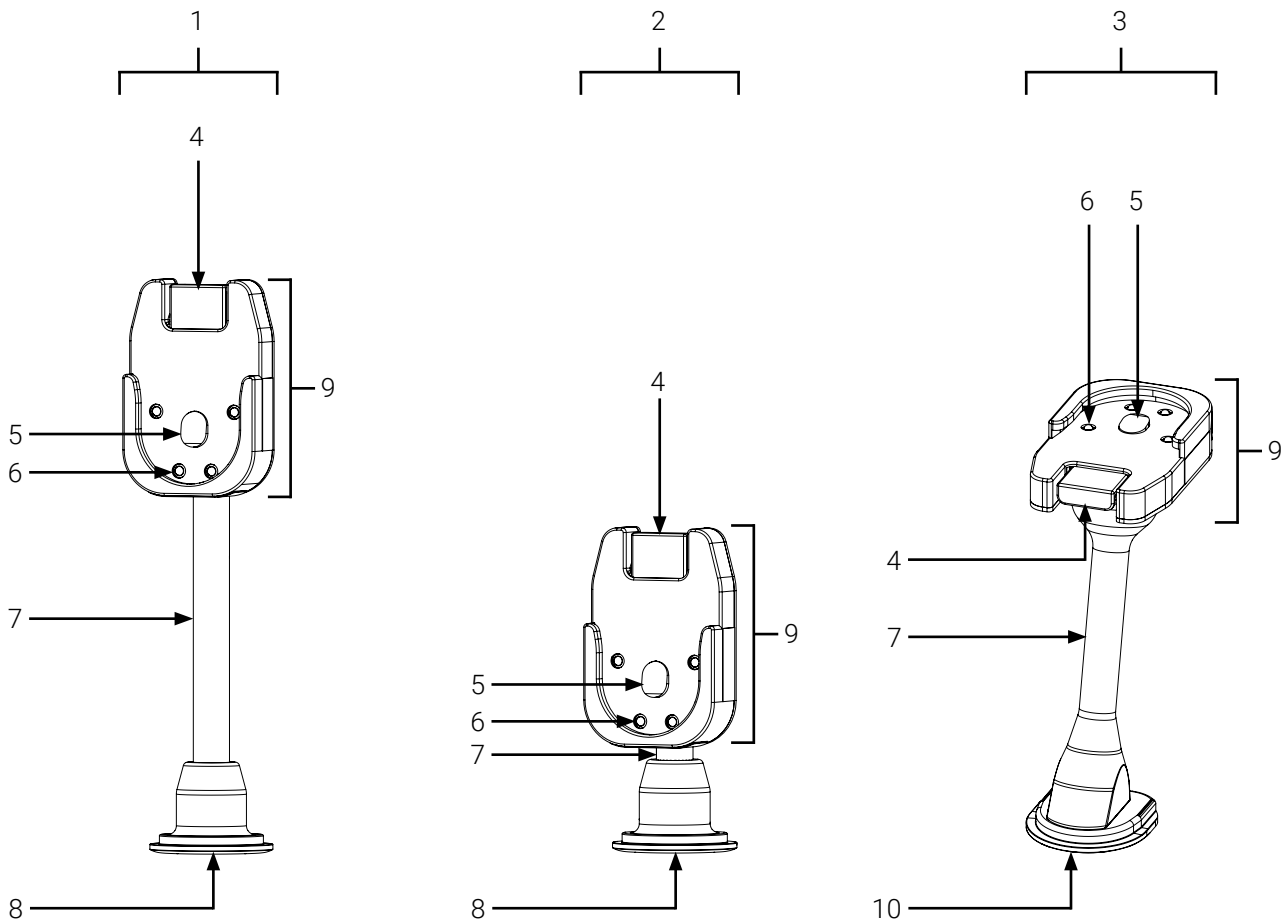

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Safety MD-Transporter (vertical, standard)    | 6. Plongeur (4X)              |
| 2. Safety MD-Transporter (vertical, court)       | 7. Poteau                     |
| 3. Safety MD-Transporter (horizontal, angulaire) | 8. Micro disque               |
| 4. Bouton à déclenchement rapide                 | 9. Micro Base                 |
| 5. Mécanisme de verrouillage                     | 10. Micro disque antirotation |

**Figure 21:** Points d'inspection illustrés

#### Annexe IV Pièces/ensemble de remplacement



Le contenu de cette section est destiné au personnel ayant un niveau de connaissance chevronné ou avancé. Consulter la section « Compétence de l'utilisateur » à la page 5 au besoin.

Technimount se réserve le droit de changer les numéros de pièce/ensembles et les produits sans préavis. Communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse [customerservice@technimount.com](mailto:customerservice@technimount.com) afin de s'assurer des options et de la disponibilité des produits, ou avec le support technique à l'adresse [techsupport@technimount.com](mailto:techsupport@technimount.com) pour les pièces/ensemble de rechange ou les problèmes liés à la réparation.

| # RÉFÉRENCE | # DE PIÈCE/ENSEMBLE | DESCRIPTION DE PIÈCE/ENSEMBLE | PROCÉDURE DE REMPLACEMENT |
|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| N/A         | N/A                 | N/A                           | N/A                       |





**TECHNIMOUNT**  
EMS®

SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ  
LÀ OÙ C'EST IMPORTANT