




INSAUSTI®

CONCEVOIR / CONSTRUIRE / INNOVER

MANUEL D'UTILISATEUR



INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO S.L.U.
Pol. Ind. Comarca 2, Calle A, Nave 3, 31191 Barbatáin (Espagne)
Téléphone: +34 948 149588
www.insausti.eu

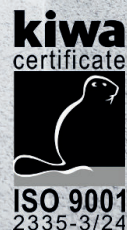

1. GÉNÉRAL

Ce manuel d'utilisation s'applique à toutes les séries de chariots et à tous les produits INSAUSTI.

CHARIOTS STATIQUES

Série SQS - 480 x 480 mm.

Tous les chariots de cette série sont considérés comme des Produits Sanitaires de Classe I.



Série 300 - 640 x 480 / 900 x 630 mm.

Tous les chariots de cette série sont considérés comme des Produits Sanitaires de Classe I.



CHARIOTS À GRANDE MOBILITÉ

Série SQM - 480 x 480 mm.

Tous les chariots de cette série sont considérés comme des Produits Sanitaires de Classe I.



Série 100 - 640 x 480 mm.

Tous les chariots de cette série sont considérés comme des Produits Sanitaires de Classe I.



Série 700 - Entrepôt 640 x 480 / 900 x 630 mm.

Tous les chariots de cette série sont considérés comme des meubles d'organisation hospitalière.



Série 600 - Transport 640 x 480 / 900 x 630 mm.

Tous les chariots de cette série sont considérés comme des meubles d'organisation hospitalière.



Série 500 - Transport 900 x 570 mm.

Tous les chariots de cette série sont considérés comme des meubles d'organisation hospitalière.



2. OBJECTIF DES PRODUITS

Les chariots médicaux INSAUSTI sont conçus pour stocker ou transporter tout matériel utilisé dans les différentes zones d'un hôpital.

3. STOCKAGE

Aucun stockage particulier n'est nécessaire.

4. MAINTENANCE

Les chariots médicaux INSAUSTI ne nécessitent pas de maintenance technique. La solidité de la structure monobloc leur permet de résister au fil du temps sans incident technique.

4.1. NETTOYAGE DES PARTIES EN POLYÉTHYLÈNE ET EN POLYPROPYLENE DU CHARIOT ET DES ACCESSOIRES

- Nettoyage : mouiller un chiffon avec de l'eau et du savon, une fois égoutté, nettoyer.
- Ne pas mélanger les produits chimiques lors du nettoyage.
- Haute résistance : alcool pur à 100 % (non dilué), eau de Javel, détergent, solutions savonneuses, huiles, graisses, ammoniaque aqueuse, chlorhexidine.
- Résistance partielle : acétone, benzène, éther éthylique, essence, ozone, toluène.
- Non résistant : dichlorométhane, hydrocarbures fluorés, perchloréthylène, trichloréthylène.
- En cas de contact avec des produits chimiques, il est conseillé de ne pas les laisser agir. Nettoyer immédiatement.



PLAN DE TRAVAIL PE



PLATEAU PLIANT PE



FAÇADES DE TIROIRS PE



TIROIRS CARRÉS PP

4.2. NETTOYAGE DE L'ACIER INOXYDABLE AISI-304

L'acier inoxydable nécessite un nettoyage continu pour l'entretien.

Structure monobloc, accessoires.

- Nettoyage : mouiller un chiffon avec de l'eau et du savon, une fois égoutté, nettoyer l'acier inoxydable.
- Sécher rapidement la surface à l'aide d'un chiffon absorbant.
- Une fois l'acier sec, il est conseillé d'appliquer un produit de conservation.
- Les produits chlorés ne doivent pas être utilisés.

Exemple :

Spray de nettoyage d'entretien

- Fabricant : WURTH

- Réf. 0893121

Voir le mode d'emploi sur l'étiquette avant utilisation.



4.3. NETTOYAGE DES TIROIRS ISO

- Tiroirs ISO 600 x 400 mm en ABS. Lavable en machine :

Maximum +60° C

Minimum -20° C


- Tiroirs ISO et séparateurs PC, polycarbonate transparent. Lavable en machine :

Maximum +120° C

Minimum -40° C

Lavable en machine à chaud, machine à laver hygiénique avec une température de séchage de 90°C.

Nettoyage manuel : mouiller un chiffon avec de l'eau et du savon, une fois égoutté, nettoyé.

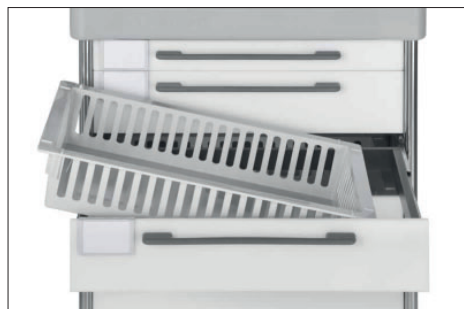

5. MONTAGE DES ACCESSOIRES

INSAUSTI livre le chariot avec certains accessoires déjà montés.
Exemple : réf. 30, 36, 37L.

Les accessoires qui nécessitent un montage sont accompagnés d'instructions spécifiques.
Exemple : réf. 26(RA4.A5), 28, 40.

6. RÉPARATIONS

En fonction du numéro de série du chariot, INSAUSTI fournira les composants nécessaires et les instructions de montage.

INSAUSTI dispose de pièces de rechange pour une période minimale de 10 ans à compter de la date d'achat des chariots médicaux.

7. ÉVALUATION DES RISQUES

Tous ont été jugés acceptables pour l'utilisation prévue du chariot.

Si le chariot est équipé d'un socle de raccordement électrique, référence 38EU/US/UK/CH, cet élément est le suivant 16A, 3500 W max.

Chariots IRM : 3 Tesla, certificat de conformité IRM.



Ouverture totale, glissières à billes en acier avec système de retenue. Les tiroirs peuvent être ouverts individuellement. Die Schubladen einzeln öffnen.

TIROIRS CARRÉS

Max. 10 kg par tiroir.




TIROIRS ISO 600 x 400 mm

Max. 20 kg par tiroir.




8. IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

CHARRIOTS

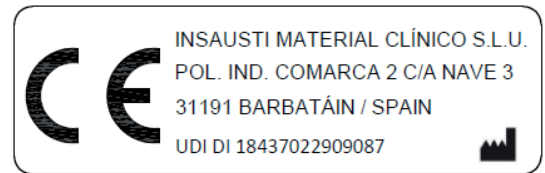

RÉF. 34 PLATEAU RCP

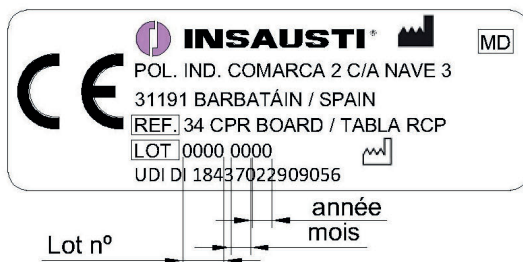

RÉF. 40 PORTE-SÉRUM



RÉF. 41 SUPPORT DE SUSPENSION SURÉLEVÉ



CE

Tous les articles marqués CE sont considérés comme des produits sanitaires de classe I et sont conformes au Règlement (UE) 2017/745 (MDR).

Banque européenne de données EUDAMED SRN - Numéro ES-MF-000003261.

AEMPS - Licence sanitaire 7439-PS.

9. DURABILITÉ

Protégez l'environnement et recyclez ce produit à la fin de sa vie utile dans le centre de recyclage le plus proche.

Les matériaux de construction du chariot médical et de ses accessoires ne contiennent pas de produits dangereux. Démontez le produit et ses composants pour séparer et recycler les différents matériaux individuellement.

L'élimination ou le recyclage des produits usagés et des emballages doit être effectué conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays concerné. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre entreprise locale de gestion des déchets.