

1. Utilisation prévue

Cette procédure de remplacement est conçue afin de permettre au personnel SMU et clinique formé de remplacer la Barre de poussée 2910-12-UN et de ses composants. Elle **ne remplace pas** la documentation de l'utilisateur, par conséquent, lire et toujours respecter toutes les directives de sécurité indiquées, ainsi que les instructions fournies dans la documentation utilisateur de votre/vos produit(s) Technimount.

REMARQUE : Bien que cette procédure de remplacement contienne les renseignements les plus récents sur le produit au moment de l'impression, elle peut contenir des différences mineures avec la version actuelle, incluant les références illustrées, les numéros de pièces et/ou les produits. Pour de plus de renseignements, communiquer avec le service à la clientèle à customerservice@technimount.com.

2. Mesures de sécurité



AVERTISSEMENT – Risque de blessure

Toujours porter/utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié en fonction de vos protocoles internes établis (p. ex., gants, lunettes, etc.) lors du remplacement.



AVERTISSEMENT – Compétence de l'utilisateur

Cette procédure de remplacement ne doit être effectuée que par du personnel qualifié (technicien biomédical ou équivalent) possédant une vaste expérience mécanique et les compétences nécessaires pour réaliser la procédure telle que décrite dans le présent document.



AVERTISSEMENT – Pièces non autorisées

- L'utilisation de n'importe quel composant/system non-autorisé et/ou incompatible peut entraîner la chute de l'équipement, un fonctionnement imprévisible ou une défaillance, pouvant causer des blessures graves aux patients, au personnel SMU et clinique.
- Technimount n'assume aucune responsabilité pour tout dommage, dysfonctionnement ou blessure résultant de l'utilisation de systèmes non autorisés ou incompatible. L'utilisation de systèmes non autorisés et/ou incompatible peut entraîner une non-conformité aux normes de sécurité applicables et annulera immédiatement toutes les garanties et couvertures de responsabilité.
- Les règlements et les normes de sécurité sont la responsabilité exclusive de l'utilisateur final. S'assurer que vos protocoles internes établies sont à jour et répondent aux spécifications techniques dans la documentation de l'utilisateur de votre/vos produit(s) Technimount, ainsi qu'aux exigences de conformité locales et régionales avant l'utilisation.



AVERTISSEMENT – Remplacement incorrect

- Les remplacements incorrects sur les produits Technimount qui n'ont pas été inspectés ni approuvés par du personnel qualifié peuvent entraîner la chute de l'équipement, un fonctionnement imprévisible ou une défaillance de l'équipement, et causer des blessures graves aux patients ou au personnel SMU et clinique.
- Suivre les instructions de remplacement telle que décrite dans le présent document pour un remplacement sûr et fiable de votre pièce de rechange et afin d'éviter les risques pouvant entraîner la chute de l'équipement, un fonctionnement imprévisible ou une défaillance, entraînant des blessures graves pour les patients ou pour le personnel SMU et clinique.

3. Temps de remplacement estimé

2 minutes, selon le nombre de composants à remplacer.

4. Pièce(s) de remplacement

- Barre de poussée 2910-12-UN
- Bouton 2 po 921-30-UN
- Mousqueton 989-00-PFXT

5. Outil(s) fourni(s) par le client

Aucun requis.

6. Remplacer la Barre de poussée 2910-12-UN et ses composants

REMARQUE : Les illustrations présentées dans cette section ont pour but de faciliter la compréhension de l'utilisateur et peuvent différer de votre configuration. Les instructions s'appliquent aux systèmes/supports de fixation compatibles. Consulter la documentation de l'utilisateur du système/support de fixation pour les instructions, les mesures de sécurité et l'utilisation sécuritaire.

6.1. Remplacer la Barre de poussée 2910-12-UN

1. Appuyer sur le bouton à déclenchement rapide de la barre de poussée pour la retirer de son support (Figure 1). La barre de poussée ne sera **pas** réutilisée. Consulter vos protocoles internes établies et les lois environnementales applicables dans votre juridiction pour disposer de la pièce conformément.

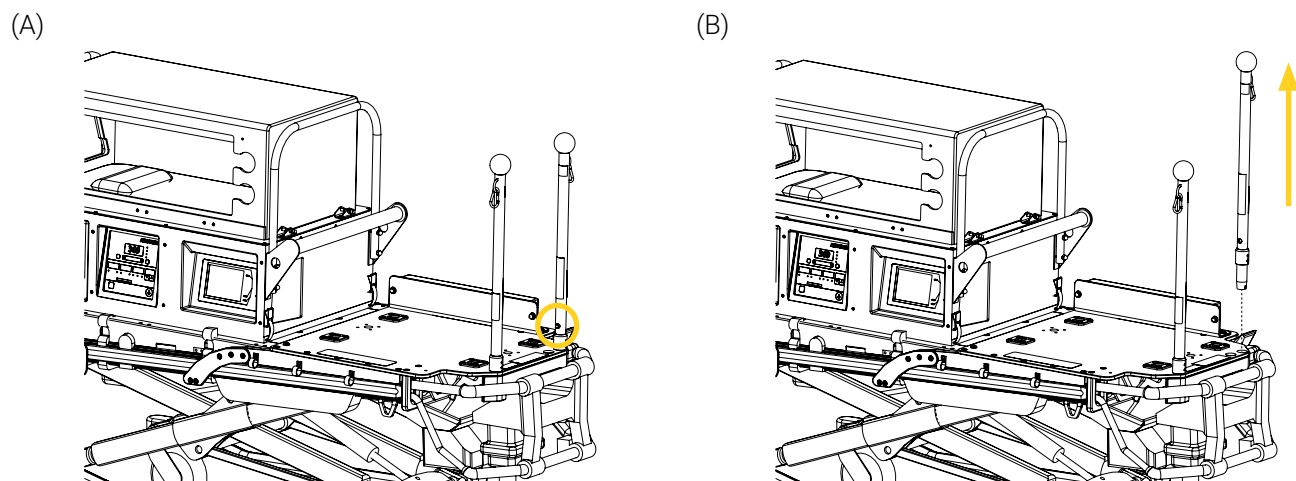


Figure 1: Retrait de la barre de poussée endommagée

- Aligner et insérer la nouvelle barre de poussée dans le support, pousser vers le bas, puis tourner la barre dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'au son du clic (Figure 2).

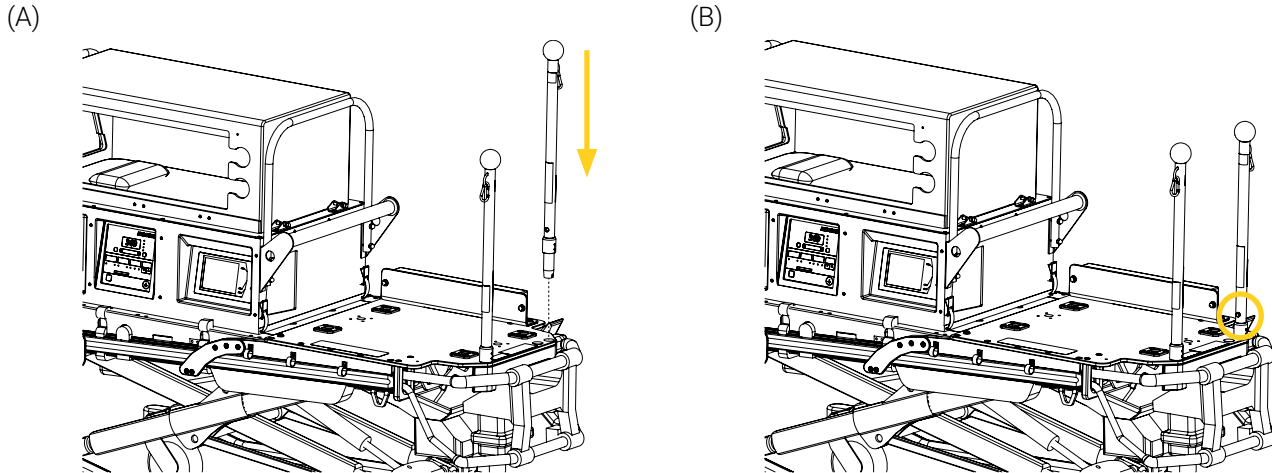


Figure 2: Installation de la nouvelle barre de poussée

- Soulever et descendre la barre de poussée à quelques reprises pour s'assurer qu'elle soit verrouillée et sécurisée dans le support. Si la barre reste dans le support suite à la vérification, elle est verrouillée et sécurisée.
- Répéter toutes les étapes pour remplacer les autres barres de poussées qui ont besoin d'être remplacées.

Le remplacement de la Barre de poussée 2910-12-UN est complété.

6.2. Remplacer le bouton 2 po 921-30-UN

- Tourner le bouton endommagé dans le sens antihoraire et le retirer de la barre de poussée (Figure 3). Le bouton ne sera **pas** réutilisé. Consulter vos protocoles internes établis et les lois environnementales applicables dans votre juridiction pour disposer de la pièce conformément.

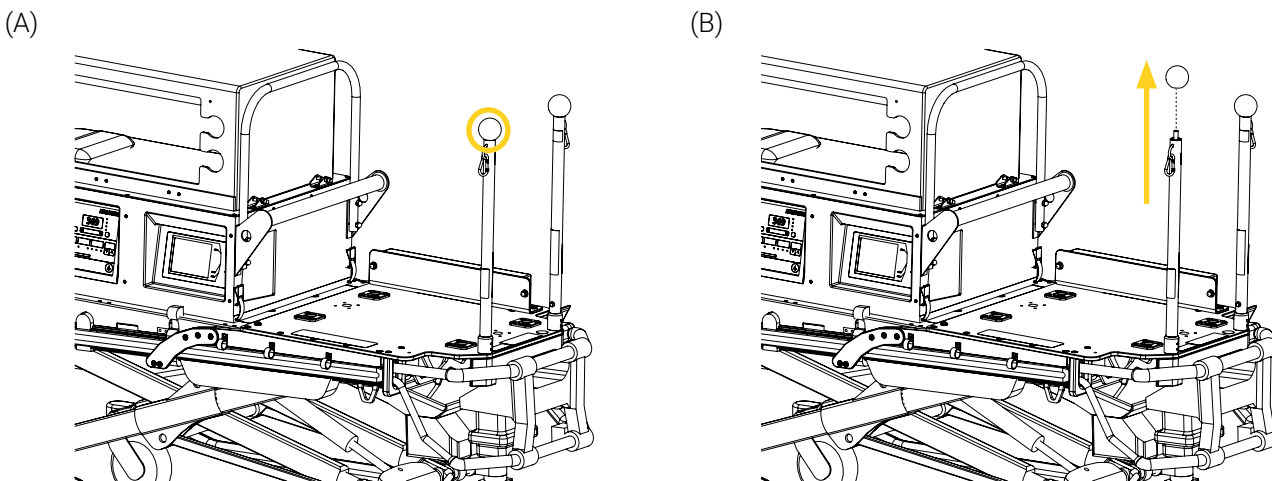


Figure 3: Retrait du bouton endommagé

2. Installer le nouveau bouton sur la barre de poussée, puis le tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit serré (Figure 4).

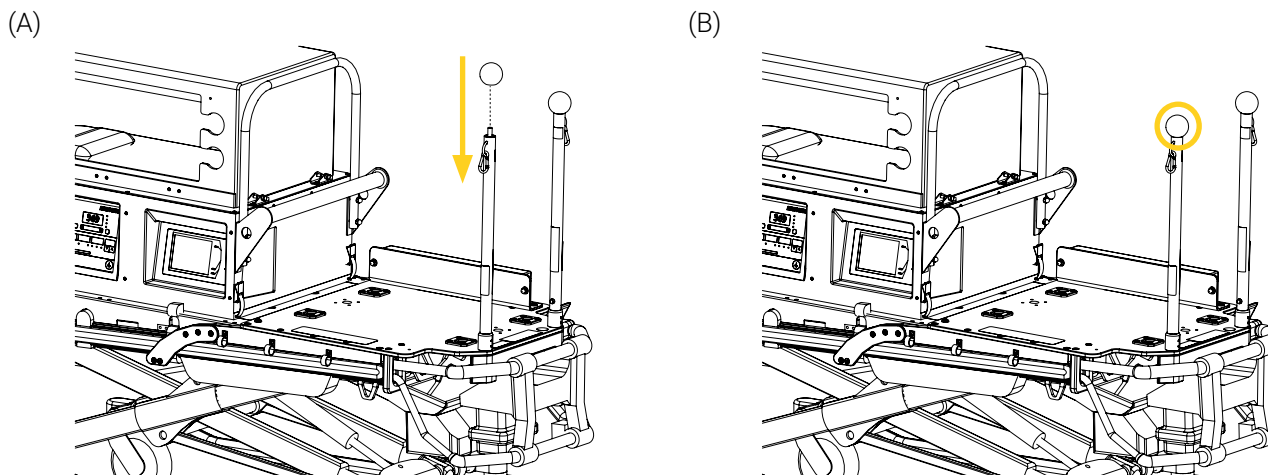


Figure 4: Installation du nouveau bouton

3. Soulever et descendre le bouton à quelques reprises pour s'assurer qu'il soit suffisamment serré sur la barre de poussée. Si le bouton ne bouge pas suite à la vérification, il est suffisamment serré.
4. Répéter toutes les étapes pour remplacer les autres boutons qui ont besoin d'être remplacés.

Le remplacement du bouton 2 po 921-30-UN est complété.

6.3. Remplacer le mousqueton 989-00-PFXT

1. Appuyer sur la détente et décrocher le mousqueton endommagé de la barre de poussée pour le retirer (Figure 5). Le mousqueton ne sera **pas** réutilisé. Consulter vos protocoles internes établis et les lois environnementales applicables dans votre juridiction pour disposer de la pièce conformément.

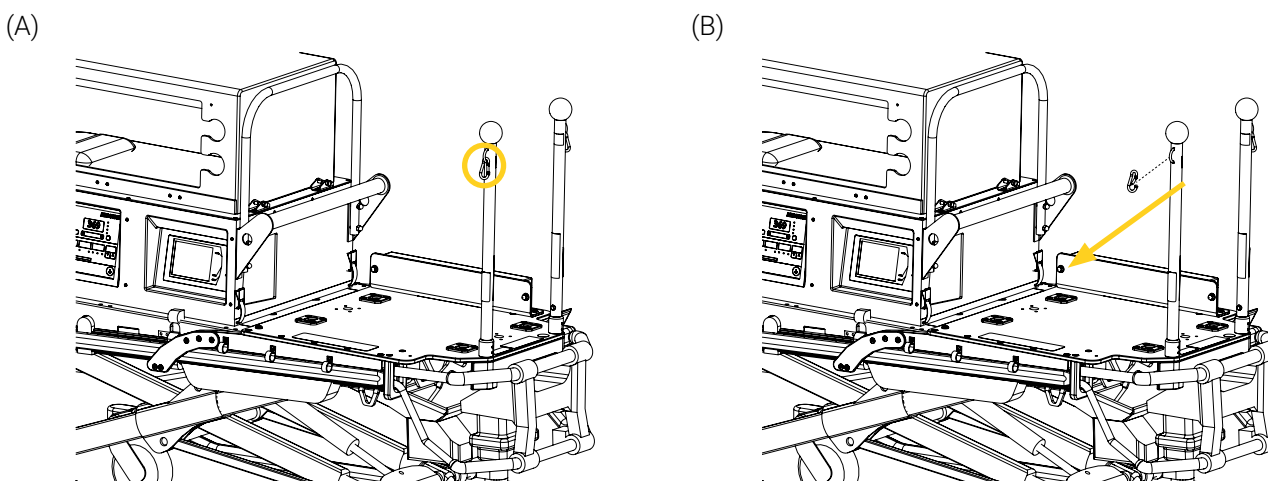


Figure 5: Retrait du mousqueton endommagé

2. Appuyer sur la détente du nouveau mousqueton sur la barre de poussée (Figure 6).

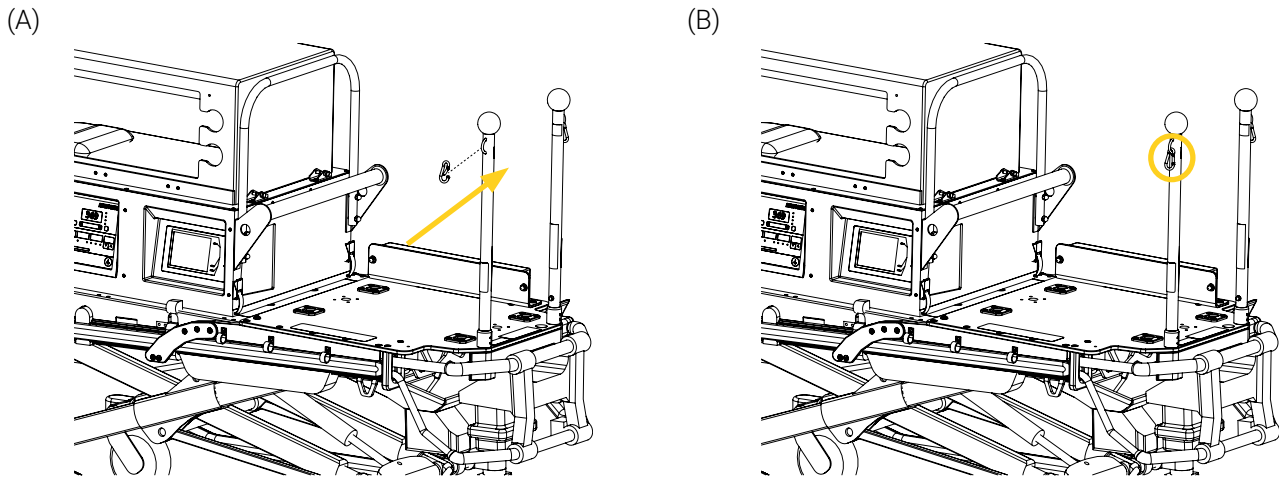


Figure 6: Installation du nouveau mousqueton

3. Bouger le mousqueton de haut en bas et gauche à droite à quelques reprises pour s'assurer qu'il soit verrouillé sur la barre de poussée. Si le mousqueton reste sur la barre suite à la vérification, il est verrouillé.
4. Répéter toutes les étapes pour remplacer les autres mousquetons qui ont besoin d'être remplacés.

Le remplacement du mousqueton 989-00-PFXT est complété.

7. Tests fonctionnels

En cas de non-conformité, contacter immédiatement le support technique à techsupport@technimount.com pour un plan d'action correctif.

LISTE DE VÉRIFICATION E DES TESTS FONCTIONNELS

Barre de poussée 2910-12-UN

- Insérer/retirer la barre de poussée dans/de son support à quelques reprises et s'assurer du bon fonctionnement du mécanisme de sécurité. □
 - Si la barre de poussée ne s'insère pas facilement dans le support et ne se verrouille pas et/ou ne se retire pas lorsque le bouton à déclenchement rapide est appuyé, il y a une non-conformité.
 - Si le bouton à déclenchement rapide ne s'insère pas dans le mécanisme lorsqu'il est appuyé et/ou qu'une résistance est ressentie, il y a une non-conformité.
 - Si le bouton à déclenchement rapide ne se rétracte pas hors du mécanisme lorsqu'il est relâché et/ou qu'il reste collé, il y a une non-conformité.
 - Si la barre de poussée bouge après avoir été correctement installée dans le support et avoir entendu le son du clic, il y a une non-conformité.

LISTE DE VÉRIFICATION E DES TESTS FONCTIONNELS**Bouton 2 po 921-30-UN**

- Soulever/descendre le bouton à quelques reprises et s'assurer qu'il soit suffisamment serré sur la barre de poussée. ☐
 - *Si le bouton bouge suite à la vérification, tourner-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit serré.*
 - *Si le bouton bouge toujours suite à l'avoir serré, il y a une non-conformité.*

Mousqueton 989-00-PFXT

- Appuyer sur/relâcher la détente du mousqueton a quelques reprises et s'assurer qu'il soit fonctionnel. ☐
 - *Si la détente ne s'ouvre pas lorsqu'elle appuyée et/ou ne se referme pas lorsqu'elle est relâchée, il y a une non-conformité.*

8. Liste de vérification de remplacement

1. Ajouter vos commentaires et/ou observations, après avoir complété la liste de vérification de remplacement, si nécessaire.
2. Dater, signer, et conserver vos activités de remplacement dans vos dossiers.

LISTE DE VÉRIFICATION DE REMPLACEMENT

- A utilisé la visserie, les pièces/kits et les outils recommandés. ☐
- A effectué la procédure de remplacement conformément aux présentes instructions et aux réglementations locales de sécurité. ☐
- A effectué la liste de vérification des tests fonctionnels. ☐
- A recyclé ou disposé des pièces/kits remplacées conformément aux lois environnementales applicables, aux directives en matière de déchets et aux réglementations spécifiées dans nos politiques environnementales locales (nationales ou régionales) et/ou dans les fiches de données de sécurité (FDS) applicables. ☐

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Procédure de remplacement complétée le (jj/mm/aaaa) :

Procédure de remplacement complétée par :
