



TECHNIMOUNT
EMS™

XTENSION PRO™ ASSISTANT – CCT/C

ANNEXE - INSTALLATION DE LA CONFIGURATION C



1. Consignes générales de sécurité



ATTENTION - Sécurité de la manutention et du fonctionnement

- Les systèmes de fixation ont été conçus spécifiquement pour cette configuration. Le remplacement d'un appareil par un autre modèle ou un déplacement de position doit être validé par Technimount.
- Il est important de ne pas inverser ou modifier la position des équipements pour des raisons de sécurité, de balancement de poids et d'aspect pratique. Se référer au guide des codes de couleurs au besoin.



ATTENTION - Règles de sécurité


- Toujours porter une attention particulière à l'état des mécanismes de sécurité et des points de fixation, afin d'éviter tout risque excessif pour l'équipement, les patients et le personnel du service médical d'urgence. Suivre les instructions définies dans ce document.
- Toujours s'assurer que les appareils médicaux sont bien fixés dans leur support et que les mécanismes de verrouillage sont fonctionnels avant utilisation.



ATTENTION - Suivre les instructions d'utilisation

- Toujours lire et respecter toutes les consignes de sécurité identifiées, ainsi que les instructions fournies dans ce document.
- Se référer au manuel d'utilisation du fabricant pour les précautions de sécurité et les instructions d'utilisation pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil médical.
- Se référer au manuel d'utilisation de la civière pour les précautions de sécurité et les instructions d'utilisation pour une utilisation en toute sécurité du Stryker® Power-PRO™ XT.

2. Utilisation des systèmes

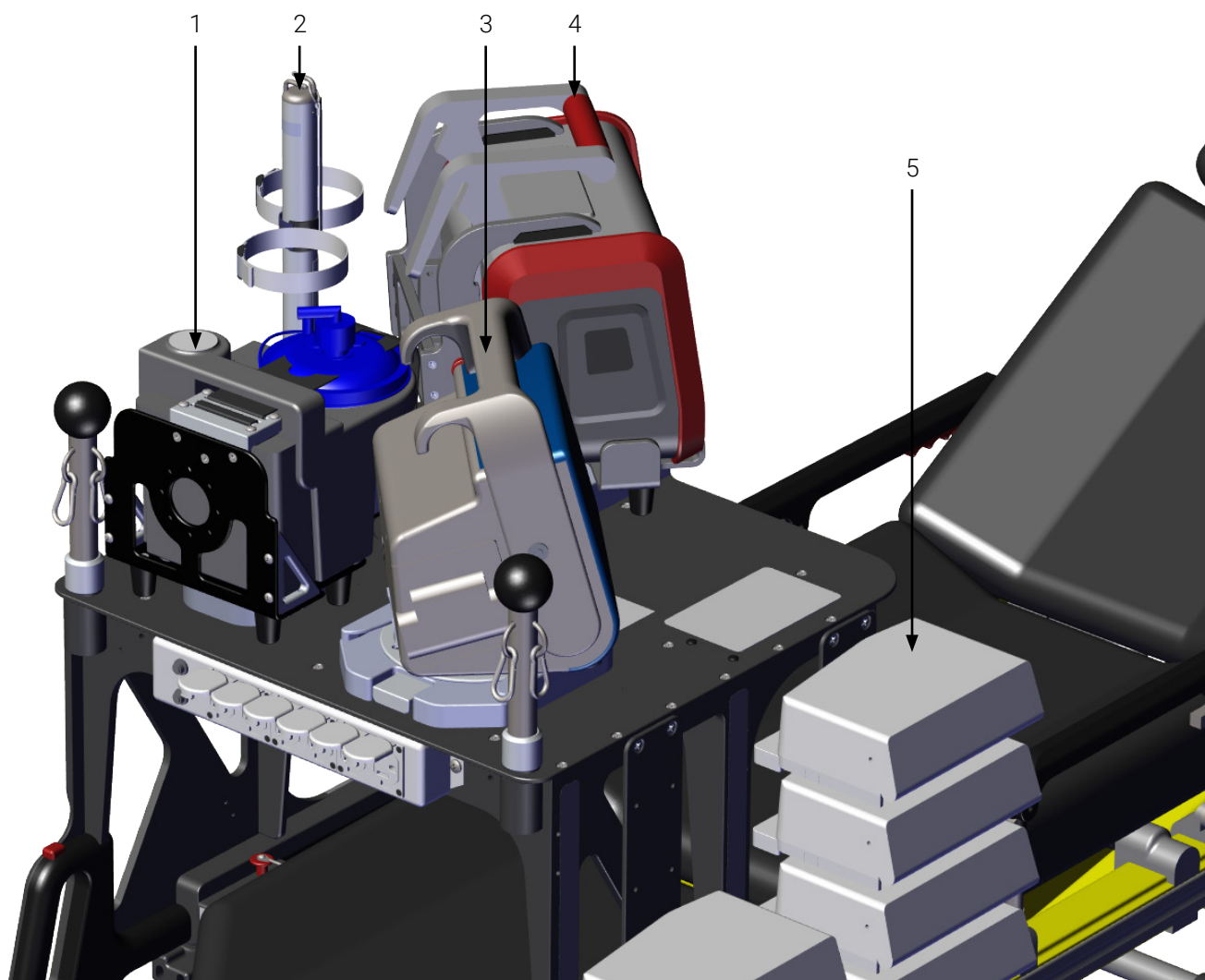

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Drive DevilBiss® VacuAide 7305 | 4. Hamilton Medical Hamilton-T1™ |
| 2. Technimount Techni-IV pole | 5. B. Braun Infusomat® Space® |
| 3. ZOLL® Medical Corporation
ZOLL® X Series® | |

Figure 1: Configuration C - Structure mobile

3. Spécifications techniques

Nom de produit	Xtension Pro™ Assistant - CCT/C - Configuration C
Description	Système de fixation pour le transport terrestre des appareils médicaux dans le cadre de soins critiques sur civière Stryker® Power-PRO™
Numéro de pièce	1620-00-PFXT
Caractéristiques	- 2 Standard Surface Bases de Technimount - 1 Micro Base ou 1 Standard Surface Base de Technimount additionnelle - 2 barres d'alimentation de grade médical avec protection de surtensions - Système de glissement - Espace pour 6 pompes Baxter Spectrum® IQ ou 6 B. Braun Infusomat® Space®/Perfusor® Space®
Environnement d'opération	SPU/Soins critiques (terrestre)
Conformité	Testé en conformité avec SAE J3043
Civière compatible¹	Stryker® Power-PRO™ XT
Système de fixation compatible	Supports Bracket Pro Serie® de Technimount avec disques inférieurs standards et/ou micro disques
Dimensions (L X P X H)	25.2 po x 28.6 po x 22.6 po (64 cm x 72.7 cm x 57.4 cm)
Poids	- Structure mobile avec 3 Standard Surface Bases: 41.2 lb (18.7 kg) - Blocs de fixation avec systèmes de rail: 26.9 lb (12.3 kg) - Supports à pompes B. Braun: 9.2 lb (4.2 kg) - Supports à pompes Baxter: 6.2 lb (2.9 kg)
Composition	- Structure mobile : aluminium 60601-T6, fini anodisé noir - Blocs de retenue : aluminium 60601-T6, fini anodisé noir - Système de rail : aluminium 60601-T6 et acier inoxydable - Poignée de verrouillage : aluminium 60601-T6 et plastique acétal - Micro Base et Standard Surface Bases : aluminium 6061-T6, fini anodisé argent
Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	103 lb (46.8 kg)
Température de fonctionnement	- 31° F à 113° F (- 35° C à 45° C)
Installation	- La structure mobile s'insère sur les rails qui sont fixées sur les blocs de fixation sur la civière. Le système est maintenu en place avec des verrous de chaque côté de la civière. - Les poignées de déclenchement rapide sont situées du côté sommier de pied et permettent l'extension du système sur les rails.

¹ Les noms de manufacturiers et d'équipements médicaux sont des Marques Commerciales^{MC} ou des Marques Déposées^{MD} de leurs détenteurs respectifs. Technimount n'a pas de relation commerciale avec ces manufacturiers d'équipements médicaux.

Options de modèle & configuration

- Fixation de cylindre à gaz de type D/M15
- Tige à infusion Techni-IV approuvée pour le transport terrestre, jusqu'à 1,5 L (1.5 kg) de capacité (50 oz ou 3.3 lb)
- Jusqu'à 2 barres d'alimentation (6 prises par barre)
- Support pour pompes à infusion Spectrum® IQ ou Infusomat® Space®/Perfusor® Space®
- Barres de poussée (tête et/ou pied de civière)
- Communiquez avec le Service à la clientèle à customerservice@technimount.com pour plus d'options

4. Pièces de rechanges

Technimount se réserve le droit de changer les numéros de pièces et de produits sans avis préalable. Pour plus d'information ou pour s'assurer des options de produits ou de leurs disponibilités, veuillez contacter le Support Technique à techsupport@technimount.com.

NUMÉRO DE PIÈCE/ D'ENSEMBLE	DESCRIPTION DE PIÈCE/D'ENSEMBLE
120-20-UN-510	Micro Base - horizontal
100-20-UN	Standard Surface Base
1620-10-PFXT	Xtension Pro™ Assistant - CCT - Structure mobile
1620-11-PFXT-RHS	Xtension Pro™ Assistant - CCT - Assemblage du bloc de fixation (droit)
1620-11-PFXT-LFS	Xtension Pro™ Assistant - CCT - Assemblage du bloc de fixation (gauche)
1620-14-PFXT-FPB	Xtension Pro™ Assistant - CCT – 2 ensembles de barres de poussée (sommier de renfort de pied) incluant des Blocs de fixation, barres de poussée, collets en aluminium, anneaux en plastique, vis et mousquetons
1620-15-PFXT-BPB	Xtension Pro™ Assistant - CCT – 2 ensembles de barres de poussée (sommier de renfort de tête) incluant des Blocs de fixation, barres de poussée, collets en aluminium, anneaux en plastique, vis et mousquetons
1620-16-PFXT-BXIQ-GR3	Xtension Pro™ Assistant - CCT - Supports à 3-pompes Baxter Spectrum® IQ
1620-17-PFXT-BBRK-3GR	Xtension Pro™ Assistant - CCT – Supports à 3-pompes B. Braun Infusomat® Space®/Perfusor® Space®
1620-18-PFXT-IV	Xtension Pro™ Assistant - CCT – Tige à infusion Techni-IV
860-00-IV-HLD	Courroie de la tige à infusion Techni-IV
989-00-PFXT	Mousqueton en acier inoxydable pour barres de poussées (vendu à l'unité)
981-00-PFXT	Bouchon à vis pour bloc de fixation (ensemble de 16 bouchons)
982-00-PFXT	Goupilles de verrouillage avec cordons de fil de fer et vis
3000-00-PS-607-INV	Barre d'alimentation de grade médical 6-prises avec protection surtension, 7'



TECHNIMOUNT

EMS™

Technimount EMS offre des solutions de fixation qui peuvent être installées sur les comptoirs d'ambulance, les murs et les civières qui peuvent également suivre le patient tout au long du continuum de soins. Notre niveau de flexibilité inégalé permet une meilleure utilisation dans les environnements des services médicaux d'urgence, hospitaliers et militaires.

Technimount EMS offre des solutions innovantes qui répondent aux besoins uniques en matière de gestion des appareils médicaux des équipes d'urgence et de transport de soins critiques pour les ambulances terrestres et aériennes. La sécurité est au cœur de nos valeurs. Tous les systèmes Technimount sont testés en conformité avec les normes les plus strictes de l'industrie en matière de résistance à l'impact. Technimount EMS s'engage à fournir des solutions de transport innovantes pouvant s'adapter aux pratiques de soins en constante évolution.

GESTION TECHNIMOUNT S.A.M.U. INC.

3770 rue Jean Marchand, suite 100-C
Québec (QC) G2C 1Y6
Canada
T + 1 581.700.6613
SF + 1 888.639.2758 (Amérique du Nord)

technimount.com

