



TECHNIMOUNT
EMS®

XTENSION PRO™ ASSISTANT - CCT/C

ANNEXE - INSTALLATION DE LA CONFIGURATION E



1. Mesures de sécurité



ATTENTION - Manipulation et utilisation sécuritaires

- Les systèmes de fixation ont été conçus spécifiquement pour cette configuration. Le remplacement d'un appareil par un autre modèle ou un déplacement de position doit être validé par Technimount.
- Ne pas inverser, ni modifier la position des équipements pour des raisons de sécurité, de balancement de poids et d'aspect pratique.
- Sur la plaque supérieure du Xtension Pro™ Assistant - CCT/C, l'utilisation d'un adaptateur Surface Converter Pro est requis pour l'installation d'un appareil médical PLUM 360™ sur une Standard Surface Base.
- Si un incident grave survient avec la solution de support, cesser immédiatement d'utiliser le produit, signaler cet incident au soutien technique à l'adresse technicalsupport@technimount.com et à l'organisme de réglementation concerné.



ATTENTION - Pratique sécuritaire

- Porter toujours une attention particulière à l'état des mécanismes de sécurité afin d'éviter tout risque excessif pour l'appareil, les patients et le personnel des services médicaux d'urgence. Suivre les instructions tel que définies dans ce document.
- S'assurer que les appareils médicaux sont fixés dans leur support et que les mécanismes de verrouillage sont fonctionnel avant l'utilisation.



ATTENTION - Suivre les instructions d'utilisation

- Lire et toujours respecter toutes les directives de sécurité indiquées, ainsi que les instructions fournies dans le présent document.
- Consulter le manuel de l'utilisateur du fabricant pour connaître les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation sécuritaire des appareils médicaux.
- Consulter le manuel de l'utilisateur de la civière pour connaître les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation sécuritaire de la civière Stryker® Power-PRO™ XT.

2. Installation des configurations

2.1. Configuration E - Installation avec 5 PLUM 360™



1. Tige à soluté Techni-IV

2. PLUM 360™ et Bracket Pro Serie® 221

3. Surface Converter Pro

Figure 1: Configuration E - Installation avec 5 PLUM 360™

2.2. Configuration E - Installation avec 4 PLUM 360™ et 1 Hamilton T-1®



- | | |
|--|--|
| 1. PLUM 360™ et Bracket Pro Serie® 221 | 3. Hamilton-T1® et Bracket Pro Serie® 60 |
| 2. Tige à soluté Techni-IV | 4. Surface Converter Pro |

Figure 2: Configuration E - Installation avec 4 PLUM 360™ et 1 Hamilton T-1®

2.3. Configuration E - Installation avec 3 PLUM 360™, 1 Hamilton T-1® et 1 LIFEPAK® 15



- | | |
|---|--|
| 1. Tige à soluté Techni-IV | 3. Hamilton-T1® et Bracket Pro Serie® 60 |
| 2. LIFEPAK® 15 et Bracket Pro Serie® 35 | 4. PLUM 360™ et Bracket Pro Serie® 221 |

Figure 3: Configuration E - Installation avec 3 PLUM 360™, 1 Hamilton T-1® et 1 LIFEPAK® 15

2.4. Configuration E - Installation avec 3 PLUM 360™, 1 Monnal T60® et 1 LIFEPAK® 15



- | | |
|---|--|
| 1. Tige à soluté Techni-IV | 3. Monnal T60® et Bracket Pro Serie® 110 |
| 2. LIFEPAK® 15 et Bracket Pro Serie® 35 | 4. PLUM 360™ et Bracket Pro Serie® 221 |

Figure 4: Configuration E - Installation avec 3 PLUM 360™, 1 Monnal T60® et 1 LIFEPAK® 15

3. Spécifications techniques

Nom de produit	Xtension Pro™ Assistant - CCT/C - Configuration E
Description	Système de fixation pour sur civière pour sécuriser multiples appareils médicaux lors du transport terrestre de patient en soins critiques
Code de produit	1660-12-PFXT
Caractéristiques	- Interchangeabilité entre appareils médicaux - Système de glissement pour le transfert latéral du patient - Installation jusqu'à 3 appareils médicaux sur le dessus de la structure mobile - Installation jusqu'à 6 pompes sur le côté de la structure mobile - Mécanismes de déclenchement rapide - Tige à soluté Techni-IV avec courroie approuvée pour le transport terrestre - Barre d'alimentation intégrée de qualité médicale avec protection contre les surtensions
Environnement d'opération	Transport de soins critiques (terrestre)
Conformité	Testé en conformité avec SAE J3043
Civière compatible	Stryker® Power-PRO™ XT
Support compatible	Supports Bracket Pro Serie® de Technimount avec disques inférieurs standards et/ou micro disques
Dimensions (L X P X H¹)	64 x 72,7 x 57,4 cm (25,2 x 28,6 x 22,6 po)
Poids	- Structure mobile avec 2 Bracket Pro Serie® 221 fixes, 2 Standard Surface Bases et 1 Micro Base : 24,3 kg (53,5 lb) - Structure mobile avec 2 Bracket Pro Serie® 221 fixes, 2 Standard Surface Bases, 1 Micro Base et 1 Surface Converter Pro: 25,5 kg (56,2 lb) - Structure mobile avec 2 Bracket Pro Serie® 221 fixes, 2 Standard Surface Bases, 1 Micro Base et 2 Surface Converter Pro: 26,7 kg (58,9 lb) - Blocs de fixation avec systèmes de rail: 12,3 kg (26,9 lb)
Composition	- Structure mobile : aluminium 6061-T6, fini anodisé noir - Blocs de fixation : aluminium 6061-T6, fini anodisé noir - Système de rail : aluminium 6061-T6 et acier inoxydable - Poignée de verrouillage : aluminium 6061-T6 et acétal - Barre de poussée : aluminium 6061-T6, fini anodisé noir, acier inoxydable et plastique noir - Micro Base et Standard Surface Base : aluminium 6061-T6, fini anodisé argent
Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	46,8 kg (103 lb), selon la configuration et les options choisies
Température de fonctionnement	- 31° F à 113° F (- 35° C à 45° C)

¹ Hauteur en relation avec le système, selon la configuration et les options choisies.

Installation

- Structure mobile glisse sur le système de rail qui est maintenu par 2 blocs de fixation installés sur les rails latéraux de la civière et verrouillée à l'aide de goupilles de verrouillage des deux côtés
 - Boutons à déclenchement rapide situés sur les poignées de la structure mobile
 - Appareils médicaux s'installent et se sécurisent sur les bases situés sur le dessus de la structure mobile
-

4. Pièces de rechange

Technimount se réserve le droit de changer les numéros de pièce et les produits sans préavis. Communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse customerservice@technimount.com pour vous assurer des options et de la disponibilité des produits, ou avec le soutien technique à l'adresse techsupport@technimount.com pour les pièces de rechange.

NUMÉRO DE PIÈCE/ D'ENSEMBLE	DESCRIPTION DE PIÈCE/D'ENSEMBLE
1660-12-PFXT	Structure mobile - Configuration E
1630-11-PFXT-LFS	Ensemble du bloc de fixation (côté gauche du patient)
1630-11-PFXT-RHS	Ensemble du bloc de fixation (côté droit du patient)
1620-19-PFXT-PL360-LFS	Support fixe pour pompes Plum 360™ (côté gauche du patient)
1620-18-PFXT-IV	Tige à soluté Techni-IV avec courroie
860-00-IV-HLD	Courroie pour tige à soluté
3000-00-PS-607-XTPA	Barre d'alimentation de grade médicale avec protection contre les surtensions, 6 prises
1025-SPCL-00-SBC	Surface Converter Pro
120-20-UN-510	Micro Base
100-20-UN	Standard Surface Base
989-00-PFXT	Mousqueton pour barres de poussées
982-10-PFXT	Goupille de verrouillage avec cordon en fil métallique et vis
9002-00-PFXT	Bloc d'ancrage pour barres de poussées
980-00-PFXT	Collets pour barres de poussées (qté 2)
1620-14-PFXT-FPB	Barres de poussées, côté tête du patient (qté 2)
921-30-UN	Bouton sphérique de la barre de poussée



TECHNIMOUNT

EMS®

Technimount EMS offre des solutions de fixation qui peuvent être installées sur les comptoirs d'ambulance, les murs et les civières qui peuvent également suivre le patient tout au long du continuum de soins. Notre niveau de flexibilité inégalé permet une utilisation sans limite dans les environnements des services médicaux d'urgence, hospitaliers et militaires.

Technimount EMS offre des solutions innovantes qui répondent aux besoins uniques en matière de gestion d'appareils médicaux des équipes d'urgence et de transport de soins critiques pour les ambulances terrestres et aériennes. La sécurité est au cœur de nos valeurs. Tous les systèmes Technimount sont testés en conformité avec les normes les plus strictes de l'industrie en matière de résistance à l'impact. Technimount EMS s'engage à fournir des solutions de transport innovantes pouvant s'adapter aux pratiques de soins en constante évolution.

GESTION TECHNIMOUNT S.A.M.U. INC.

3770 rue Jean Marchand, suite 100-C
Québec (QC) G2C 1Y6
Canada

T + 1 581.700.6613

SF + 1 888.639.2758 (Amérique du Nord)

technimount.com